



medemagruppen



medemagruppen

AMS – Aktivt Mobiliserings System



**AMS** er et unikt madrassystem for mobilisering av pasienten i sengen for å forebygge og behandle trykksår.

Med **AMS** beholdes og forsterkes pasientens egen mobilitet, samtidig som madrassen sørger for nødvendig bevegelse for å forebygge trykksår.

**AMS** føles som en normal madrass, og er tilnærmet lydløs i bruk. Det unike innebygde lamellsystemet gir pasienten nødvendig lateral vending med trykkavlastning på utsatte trykkpunkter. En liten avfasing i fotenden bidrar til redusert trykk på hælene ved ryggeleie.

Justerbart intervall for lateral vending; 20, 30, 60, 120 minutter intervall (0-H-V-0)

Justerbar intensitet i 4 trinn tilpasset pasientvekt.

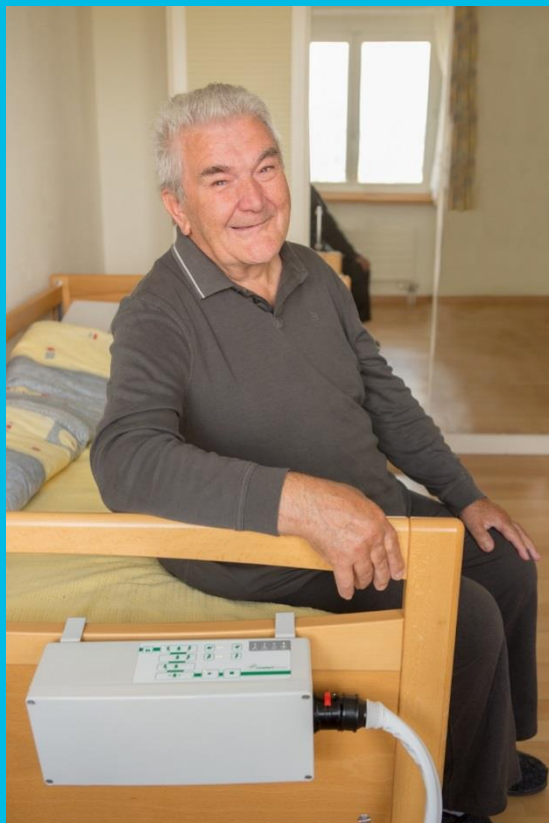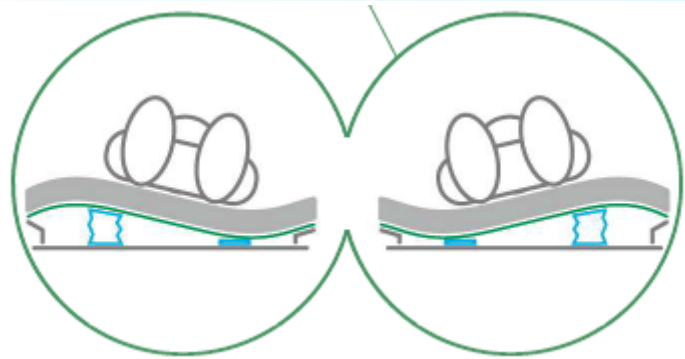

**AMS** bidrar til bedret nattesøvn og friskere pasienter med økt aktivitet og bedre humør.

Herr Kaiser ble tidligere manuelt reposisjonert hver 3. time gjennom natten, med påfølgende dårlig søvn. Dette resulterte i aggressiv opptreden på dagtid.

Med **AMS** får herr Kaiser god sammenhengende søvn gjennom hele natten, og er i godt humør med økt livskvalitet.


**AMS** bidrar til redusert arbeidsbelastning ved å ta bort behovet for manuelle reposisjoneringer gjennom natten. På den måten får personalet frigjort tid til andre viktige pleieoppgaver.

**AMS** kan benyttes i alle typer senger, til alle pasienter som er i risikogruppen for å utvikle trykksår eller allerede har trykksår. For å kartlegge risikopasienter kan sensorsystemet **Mobility Monitor** med fordel benyttes.

**AMS** er velegnet for pasienter,

- med trykksår
- med demens eller temporær forvirring
- med smerter
- som er veldig urolige
- som er aggressive
- hvor luftstøttesystemer ikke er hensiktsmessig å bruke

**AMS** består av ett lamellsystem med en profilert skummadrass over, samt en meget støysvak motorenhet som henges på sengen.

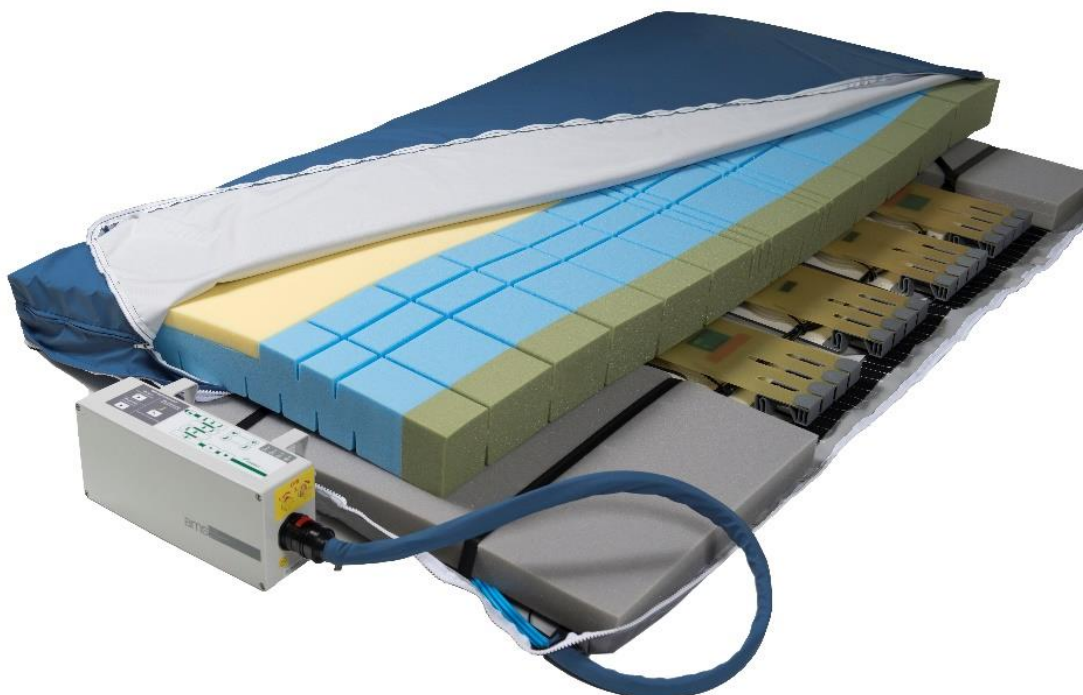

**AMS** er utviklet og produseres i Sveits i henhold til europeiske krav og normer for medisinsk utstyr:

- Samsvarserklært etter direktiv 93/42/EEC
- Oppfyller krav til elektrisk sikkerhet i henhold til EN 60601-1
- Oppfyller EMC krav i henhold til EN 60601-1-2
- Oppfyller antennelighetskrav i henhold til EN 597-1 og -2

Tekniske data:

Lengde: 200 cm	Madrassvekt: 22 kg
Bredde: 87 cm	Motorenhet: 2 kg
Høyde: 17 cm	Nettspenning: 230V/50 Hz
Brukervekt: < 150 kg	Driftstrøm: 1,1 A

Bestillingsdata:

Vare:	Varenummer:
Mobiliseringssystem AMS madrass komplett	5120-1112

## Medema Norge AS

*Din leverandør av velferdsteknologiske hjelpemidler*

[www.medema.no](http://www.medema.no)