



Sengemonitor Pro P139 med sensor Riste puste P140 Avansert monitor for epilepsivarsling

Dette er en avansert sengemonitor beregnet på varsling av epilepsianfall.

En kan koble sensorer for riste/puste, fravær, internt og ekstern mikrofon og fukt.



Den har mere avansert system for konfigurasjon og krever inngående kjennskap til diagnoser og deteksjon av disse i forhold til sengemonitor P154. En logger brukers søvnmønster over flere netter for å få gode verdier for følsomheter, forsterkninger, tider, forsinkelser etc som justeres for flere type følere.

- Kan varsle internt med radioutgang til personsøker.
- Kan varsle eksternt med releutgang ved å koble den for eksempel til en GSM viderevarsler som kan ringe/sende SMS til annen telefon. Ved ekstern varsling kreves abonnement til mobiltelefon som må dekkes av bruker selv*.

For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling internt

Sensor:	Sensor riste puste P140	vårt art.nr: 700140	HMS nr: 289666
Sender:	Sengemonitor Pro P139	vårt art.nr: 700139	HMS nr: 289667
Mottaker:	Personsøker P137	vårt art.nr: 700137	HMS nr: 211187

For deteksjon av kramper og risting (klonus) med varsling eksternt

Sensor:	Sensor riste puste P140	vårt art.nr: 700140	HMS nr: 289666
Sender:	Sengemonitor Pro P139	vårt art.nr: 700139	HMS nr: 289667
Viderevarsler:	GSM Viderevarsler*	vårt art.nr: 700119	HMS nr: 233359

Andre sensorer som kan brukes i tillegg til eller i stedet for Sensor riste puste:

For deteksjon av lyd

Sensor:	Mikrofon P158	vårt art.nr: 700158	HMS nr: 189369
---------	---------------	---------------------	----------------

For deteksjon av fukt – stort laken for vannlating

Sensor:	Fuktsensor laken P142A	vårt art.nr: 700142	HMS nr: 189366
---------	------------------------	---------------------	----------------

Det anbefales å bestille 2 laken slik at en har 1 tørt/rent å bytte til når det første blir fuktig.



For deteksjon av fukt – lite laken («pute») for oppkast, sikling

Sensor: Fuktsensor pute P142F vårt art.nr: 701422 HMS nr: 233360

Det anbefales å bestille 2 laken slik at en har 1 tørt/rent å bytte til når det første blir fuktig.

For deteksjon av fravær i seng

Sensor: Fraværsensor sengematte P143C vårt art.nr: 701431 HMS nr: 193906

Sensor: Fraværsensor ribbe 1M P143G vårt art.nr: 701432 HMS nr: 194989

***) Ved bestilling:**

- Oppgi det/de tlf nr det skal varsles til.
- Oppgi tlf nr til den som skal eie abonnement.

GSM viderevarsler må programmeres hos Picomed før forsendelse så vi må ha telefonnumrene for at vi enkelt skal få tak i nødvendig informasjon.