


Bevegelsessensor 869

61005/35

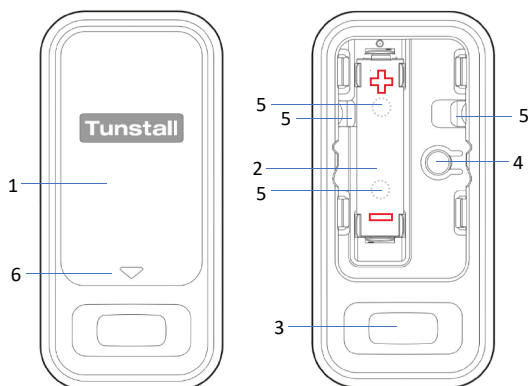

- 1) Forside
- 2) Batteri
- 3) IR-Objektiv
- 4) Funksjonsknapp
- 5) Skruelasser
- 6) Pil for fjerning av deksel

Velkommen til Bevegelsessensor 869.

Bevegelsessensoren 869 er designet for å brukes sammen med en CareAssist-alarmerhet eller andre Tunstall Telecare-aktiverte systemer. Boksen inneholder en bevegelsessensor, ett 3,6V AA litiumbatteri og to limputer med borrelås.

Les installasjonsveiledningen for bevegelsessensoren før du installerer enheten.

Installere Bevegelsessensor 869.

Bruk enten medfølgende limputer med borrelås eller skruer og veggplugg (ikke inkludert), og fest bevegelsessensoren til enten en flat vegg eller i hjørnet av to tilstøtende vegger i en monteringshøyde på 1 meter. Sett på batteriet og dekselet etter installasjon. Par deretter sensoren ved å følge instruksjonene som fulgte med for hjemmeenheten CareAssist.

Mer informasjon om bevegelsessensoren finner du i installasjonsveiledningen. Den siste versjonen av dette dokumentet kan finnes på Tunstalls nettsider.

Parametere for radiosender.

Radiofrekvens: 869.2125MHz

Stråling: Mindre enn 1 milliwatt

Bruksområde: Europa

Miljøgruppe: Gruppe II – Hovedsakelig innendørs

Samsvarserklæring.

Tunstall erklærer at radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende adresse:

uk.tunstall.com/approvals



www.tunstall.com



Vår policy for kontinuerlig utvikling betyr at produktspesifikasjoner og utseende kan endres uten varsel.

© 2019 Tunstall Group Ltd. ©

TUNSTALL er et registrert varemerke

A member of the Tunstall Healthcare Group

Tunstall Group Limited, Whitley Lodge, Whitley Bridge, Yorkshire DN14 0HR