

ACTIVE EASYRISER



VINNER
DELKONTRAKT 6:
Stoler med mekanisk
oppreisingsfunksjon

ACTIVE EASYRISER STANDARD OG
ACTIVE EASYRISER SMALL

ACTIVE EASYRISER

- Enkel i bruk, enkelt å reise seg!



Active Easyriser-serien krever ikke strøm og betjenes uten håndkontroll. Løftestolene er så enkle i bruk at du kan reise deg slik du alltid har gjort.

- Betjenes uten håndkontroll
 - Enkel i bruk for flere
- Stolen tar liten plass
 - Får plass i små stuer og rom
- Går ikke på strøm
 - Kan brukes hvor som helst i et rom uten ledninger

Active Easyriser - gjør det enklere for flere å reise seg

Serien er en helt ny generasjon løftestoler som er spesielt utviklet for å være enkle og intuitive i bruk. Løftestolene kan benyttes uten bruk av håndkontroll, og aktiveres kun ved hjelp av en tyngdeoverføring forover i sittende posisjon.


Med Active Easyriser løftestoler reiser du deg slik du alltid har gjort:

Sett beina inn under deg, ta tak i armlenene, og len deg forover.

Stolen vil da hjelpe deg opp i stående, og du har begge hendene tilgjengelig til å støtte deg på armlener under oppreising. Vi kaller det et aktivt løft, hvor du selv også får bidra med den styrken du har.

Om det er ønskelig kan man også justere hvor mye hjelp du skal få når du reiser deg. Stolen tar også imot deg når du setter deg, slik at du ikke faller ned i stolen.



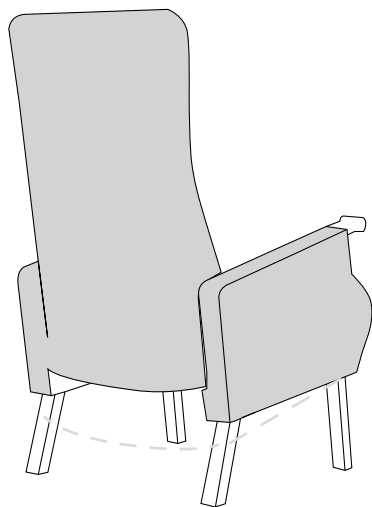

Variasjon av sittestilling

Setehøyde på stolen kan stilles fra 37-53 cm. Ved å montere bena bak lavere enn bena foran kan du også oppnå en tilt i setet. Dette gjør at stolen også kan brukes av de som ønsker å sitte mer bakoverlent i hverdagen.

Stolen vil alltid gi deg nødvendig hjelp opp i stående i ditt eget tempo. Du kan stoppe oppreisningsfunksjonen i alle posisjoner, slik at du også har mulighet til å variere sittestilling.

Unike egenskaper

Stolen tar liten plass som gjør at den også egner seg godt i små stuer og rom. Egenvekt er kun 23 kg, det gjør den enkel å flytte på ved behov.

Siden løftestolen ikke går på strøm vil den kunne brukes overalt, uten at du er avhengig av at det er en stikkontakt i nærheten. Du slipper også løse ledninger på gulvet, og du har færre feilkilder enn tradisjonelle løftestoler som går på strøm.

Alle innstillinger på stolen gjøres uten bruk av verktøy.

Alle stolene har inkontinenstrekk i ryggen som standard og inkontinenspute til sete fås som tilbehør. Dersom du ønsker å endre setehøyde, eller justere hvor mye hjelp stolen skal gi, kan dette gjøres uten bruk av verktøy. (Se brukermanual for mer info).



Hvem passer Active Easyriser for?

Active Easyriser-serien er beregnet til personer som har vanskelig for å komme seg opp av en vanlig stol, eller sette seg på en trygg måte.



Hvordan bruke Active Easyriser?

Når du skal reise deg gjør du det samme hver gang; setter beina under deg, tar tak i armlenene og lener deg forover. Dette er også slik man aktiverer stolens løftefunksjon. Stolen vil umiddelbart gi deg hjelp til å reise deg, og alltid ta imot deg når du setter deg ned. Du trenger ikke å tenke på å bruke en håndkontroll, bare at løftefunksjonen er aktivert (on). Når løftefunksjonen er av (off) vil Active Easyriser fungere som en ordinær stol.

Stolen er også et naturlig valg for mange av de som har utfordringer med nedsatt syn, håndmotorikk og evnen til å tilegne seg ny læring. Noen av disse vil ha utfordringer med å håndtere en håndkontroll med flere knapper som tradisjonelle elektriske løftestoler har.

EGENSKAPER Stabil

Stabilitet - spesielt utviklet for å gi stabilitet. Fire skråstilte ben i stolens hjørner gir ekstra god stabilitet både forover, bakover og sideveis. Dette gjør stolen trygg å sette seg ned i og reise seg opp i fra, for de som har nedsatt gang- og ståfunksjon.

Komfort

En god pute og polstring med elastiske bånd i setebunn gir god komfort for å sitte i stolen over tid. Ryggen er ergonomisk utformet og gir en naturlig støtte i korsryggen, som også bidrar til ekstra stabilitet.



Intuitiv

Det mekaniske seteløftet blir aktivert når man bruker kroppens naturlige bevegelsesmønster for å reise seg. Sett beina under deg - len deg forover - ta tak i armlenene og reis deg opp. Dette gjør det enklere å bruke stolen for de som har nedsatte kognitive ferdigheter eller læringsvansker. Reis deg som du alltid har gjort.

Enkel betjening

Stolen kan brukes uten å berøre betjeningsenheten. Så lenge løfte-mekanismen er aktivert trenger du ikke å fysisk berøre betjeningen i hverdagen. Dette betyr at du alltid har begge hender fri til å støtte deg på armlenene når du reiser eller setter deg. Stolen vil alltid stå klar for å ta imot deg når du skal sette deg.



Seks ulike modeller

(se også tekniske spesifikasjoner)

Active Easyriser finnes i seks modeller, slik at du skal få den stolen som passer deg best.

Active Easyriser Small har samme bruksområde som Standard, men er beregnet for personer med en kroppslengde på under 160 cm. Setet og ryggen er kortere sammenlignet med Active Easyriser Standard.

Inkontinestrek standard

Hms.nr. 296291

Inkontinestrek small

Hms.nr. 296292

Active Easyriser Standard for personer med høyde over ca 160 cm

Active Easyriser standard 45-60 kg

Hms.nr. 296285

Active Easyriser standard 60-80 kg

Hms.nr. 296286

Active Easyriser standard 80-110 kg

Hms.nr. 296287

Active Easyriser Small for personer med høyde under ca 160 cm

Active Easyriser small 45-60 kg

Hms.nr. 296288

Active Easyriser small 60-80 kg

Hms.nr. 296289

Active Easyriser small 80-110 kg

Hms.nr. 296290

Tekniske spesifikasjoner

Active Easyriser Standard for personer med høyde over ca 160 cm

Setehøyde min	37 cm
Setehøyde maks	53 cm
Setedybde	47 cm
Setebredde	50 cm
Ryggghøyde	79 cm
Total utvendig bredde	63 cm
Total lengde stol utvendig	88 cm
Stolens egenvekt	23 kg
Maksimal brukervekt	150 kg

Active Easyriser Small for personer med høyde under ca 160 cm

Setehøyde min	37 cm
Setehøyde maks	53 cm
Setedybde	43 cm
Setebredde	50 cm
Ryggghøyde	74 cm
Total utvendig bredde	63 cm
Total lengde stol utvendig	83 cm
Stolens egenvekt	23 kg
Maksimal brukervekt	150 kg

Tilbehør

Inkontinestrekk Standard

Inkontinestrekk Small

Active Easyriser er testet og godkjent i henhold til krav og standarder:

NS-EN 16139:2013

NS-EN 1021-1:2014

NS-EN 1021-2:2014





Om oss

Hjelpemiddelpartner AS er en norsk leverandør av velferds-teknologi og innovative hjelpemidler. Hjelpemiddelpartner AS har hovedkontor på Sandane i Nordfjord og et kontor i Tønsberg. Vi har gjennom mange år skaffet oss bred erfaring i bransjen, og tilbyr nye og innovative løsninger til det norske helsemarkedet.

Hjelpemiddelpartner har også nettbutikk med småhjelpemidler www.velferdsbutikken.no

Hjelpemiddelpartner AS
Breimsvegen 2
6823 Sandane

hmp.no



HMP.no

**VELFERDSTEKNOLOGI &
INNOVATIVE HJELPEMIDLER**

