



Scooter

Sterling Elite² PLUS

Kortmanual

OBS: Denne kortmanualen erstatter ikke Brukermanualen. Brukermanualen må leses før bruk av stolen første gang.

Om Sterling Elite² PLUS

- Kollisjonstestet
- Maks brukervekt 175 kg
- 15° statisk stabilitet - oppover, nedover og sideveis
- Setehøyde 44 - 54 cm
- Seteforskyvning +/- 8 cm fra midtstilling



For ytterligere justeringsmuligheter og mer detaljert beskrivelse, les brukermanualen for Sterling Elite² PLUS.



Les nøye advarene i forbindelse med beskrivelse av bruk og justeringer i brukermanualen.


Komfort og sikkerhet



1. Vinkelen på styrestangen kan justeres for å gjøre det lettere å gå inn og ut av scooteren, samt for å øke kjørekomforten.
- Vri spaken og trekk styrestangen opp eller ned til ønsket stilling.
 - Styret kan også vinkles. Vinkling av styret bør utføres av kvalifisert personell.



2. Setet på scooteren kan justeres forover eller bakover.
- Trekk spaken opp, og bruk beina og kroppen til å flytte setet til ønsket stilling, før du slipper opp spaken.

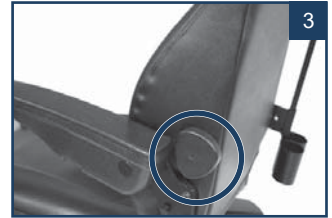

3. Lumbalstøtte for rygg
- Juster ved å vri på hjulet som er plassert bak armlenet på venstre side av scooteren.




4. Armlenevinkel
- Justeringshjulet er plassert under hoveddelen på armlenet. Hjulet kan vris begge veier for å øke eller redusere vinkelen på armlenet



5. Hevet fotplate
- Fotplaten tilpasser vinkelen på brukerens kne/legg, for å gi brukere med kortere ben maksimal komfort.



6. USB-uttak med 5V likestrøm
- Et 5 V - 1,2 A-strømuttak som kan brukes med eksternt svakstrømsutstyr, slik som telefonladere osv.

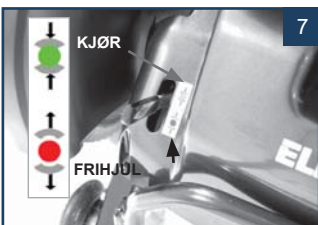

7. Frikobling
- Scooteren har to kjøremoduser: Kjøremodus eller frihjulsmodus.
 - KJØREMODUS = Alle bevegelser, inkludert bremsing, styres utelukkende av det elektroniske kontrollsystemet.
 - FRIHJULSMODUS = Bevegelser styres manuelt. Det kan også oppstå bevegelser på grunn av tyngdekraft (slag hull, fortauskanter, bakker, skråninger osv.).
 - Skyv spaken opp for å velge kjøremodus og ned for frihjulsmodus.
 - Scooteren har elektrisk inhibit som forhindrer kjøring når brems er aktivert.

Transport

Sterling Elite² PLUSS er kollisjonstestet i henhold til ISO 7176/19. Ved transport i bil eller buss skal Sterling Elite² PLUSS stropes fast i de fire stroppefestene som er markert på stolen. Batteriene er IATA godkjent for transport i fly.




Alternativer for å regulere kjørehastighet



8. Wig-Wag.

- Trekk styrespaken forsiktig med høyre hånd, eller skyv wigwag-kontrollen med venstre tommel, for å kjøre scooteren forover. Hvor langt du skyver spaken eller wigwag-kontrollen står i forhold til hvor fort scooteren kjører.
- Ved bruk av venstre hånd eller høyre tommel kan du rygge scooteren. Dette styrer også kjørehastigheten når du rygger.

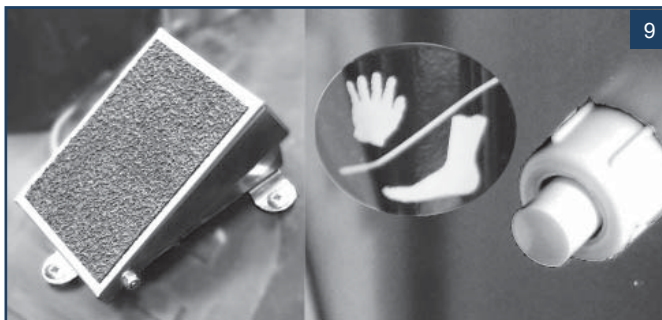

9. Fotgass

- Fotgassen kan monteres hvor som helst på gulvet i scooteren, eller på den hevete plattformen. Den brukes sammen med enten et dreiehåndtak eller en sidestyrespak.
- Det brukes i tillegg to brytere, én bryter som veksler mellom forover- og bakoverkjøring, og en annen bryter som veksler mellom bruk av fotpedalen og dreiehåndtaket eller den sidemonterte styrespaken.



10. Håndgass

- Styrespaken med dreiehåndtak kan brukes alene eller sammen med fotpedalen. Hvis den skal brukes alene, er den utstyrt med en forover-/reversbryter.
- Hvis dreiehåndtaket brukes sammen med fotpedalen brukes det i tillegg to brytere, én for forover/revers og én for å velge de forskjellige styreanordningene.

Kjøring og bruk av elektriske funksjoner

Kontrollboksen kan se anderledes ut enn figuren nedenfor avhengig av hvilket kontrollsystem din scooter er utstyrt med.

Tips for god kjøreopplevelse og bekymringsfri bruk

- Lad batteriene hver natt; påse at de alltid er fulladet
- Hold scooter og setet rent. Bruk en fuktig klut og mildt såpevann
- Sørg for jevnlig vedlikehold

Lading



Ladekontakten er lett tilgjengelig på styrestangen og kan nås når man sitter på scooteren.

- Pass på at scooteren er skrudd av.
- Koble først batteriladeren til scooteren. Koble deretter støpslet på batteriladeren til et strømuttak, og slå på laderen.
- Det GRØNNE lyset vil tennes for å vise at batteriladeren er slått PÅ. Det GULE lyset vil tennes for å vise at batteriene lades opp. Det GULE lyset vil slukkes når batteriene er ferdig oppladet.



Brukerprofilknappen endrer scooterens kjørehastighet til en forhåndsinnstilt verdi som tilsvarer 50 % av den maksimale hastigheten,