

Bruksanvisning og nødprosedyre

# Handi-Lift ML7



 handicare making everyday life easier

## Bruk av løfteplattformen

- Påse at heisens hovedbryter står på. Lampe lyser.
- Tilkall heis: Knapp merket med ønsket kjøreretning trykkes inn og holdes.
- Når heisen kommer til endepunkt, stopper den og eventuell sikkerhetsdør åpnes.
- Er løfteplattformen pakket sammen trykkes knapp merket ÅPNE (ev. symbol) på veggpanel inn og holdes inne.
- Kjør inn på plattformen og lås stolen.
- Kjølrespaken trykkes i ønsket kjøreretning og holdes. Sikkerhetsarm eller port lukkes automatisk. Når arm/port er i riktig stilling, starter løfteplattformen.
- Hold kjølrespaken til løfteplattformen stopper og sikkerhetsarm / port åpnes.
- Kjør av plattformen.
- Dersom man ønsker å pakke løfteplattformen sammen: Knapp merket LUKKE (ev. symbol) på veggpanel trykkes inn og holdes. Sikkerhetsarm og plattform går til parkert stilling. Slipp knappen. Løfteplattformen kan låses ved å slå av strømmen med nøkkelbryter på veggpanel.

## Nødprosedyrer: (Utføres av medhjelper.)

- Sikkerhetsarmen kan frigjøres manuelt. Gummiproppen i løfteplattformens frontdeksel fjernes, medlevert verktøy eller tilsvarende stikkes inn i hullet. Ved å presse innover frigjøres sikkerhetsarmen slik at den kan svinges opp.
- Når sikkerhetsarmen er løftet, kan heisbruker hjelpes ut av heisen.
- Plattformen parkeres ved at verktøyet stikkes inn i hull i løfteplattformens side og dreies.

Ved behov for service skal NAV kontaktes