


Oppreisingstol

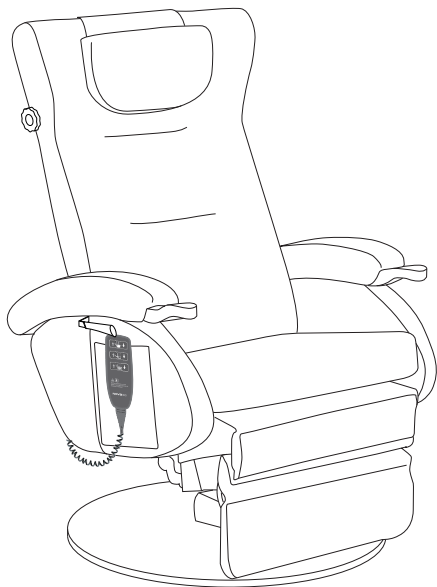


NOVA 20

HURTIGMANUAL

NO

Når du mottar oppreisingstolen

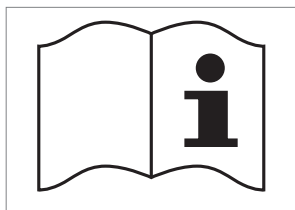


For din egen sikkerhet, og for å få best mulig utbytte av mulighetene i din nye oppreisingstol, anbefaler vi at du leser brukermanualen nøye før du tar i bruk stolen.



Kontroller at oppreisingstolen du har mottatt har korrekte mål og tilbehør i henhold til din bestilling.

Stolen blir levert ferdig montert fra fabrikk. Det kan være nødvendig å stille inn stolen til brukeren og montere eventuelt tilbehør.

Innstillinger som er vist i denne hurtigmanualen kan utføres uten bruk av verktøy og av brukeren selv, eller ledsager. Andre innstillinger utføres av kvalifisert personale.

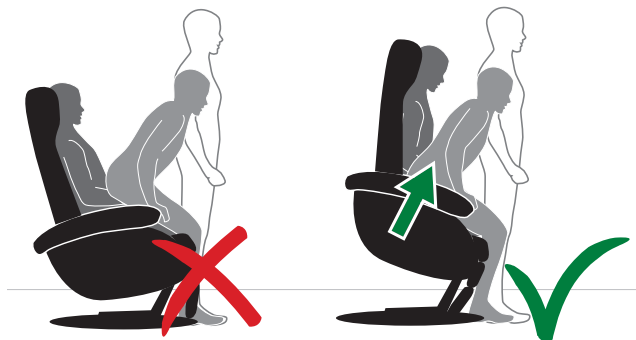

Forflytning inn- og ut av stolen

Gjennom løtefunksjonen gir Nova god og stabil støtte ved forflytning.

Reise seg:

- Kjør stolen til oppreist posisjon.
- Plasser føttene innunder deg.
- Ta tak i armlenene og stå opp.


Sette seg:

- Påse at stolen står i oppreist posisjon.
- Still deg helt inntil fotbrettet.
- Ta tak i armlenene og senk deg ned i stolen.
- Kjør stolen ned til sitteposisjon.

⚠ Advarsel!

Kjør alltid stolen opp i oppreist posisjon ved forflytning ned i- eller ut av stolen.

Unngå forflytning ned i- eller ut av stolen når stolen ikke står i oppreist posisjon.

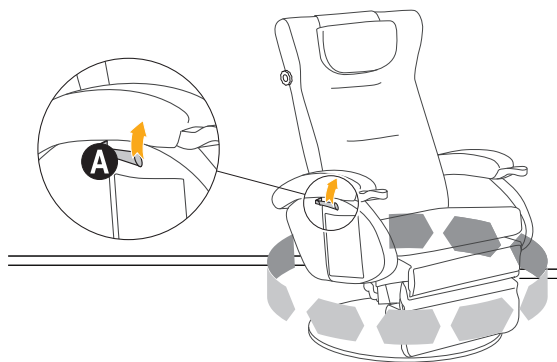

Svingutløser

Gjelder Nova som er utstyrt med svingunderstell.

Utløserhendelen for svingfunksjonen er som standard plassert på høyre siden av armlenet. Ved behov kan utløserhendelen monteres på venstre side.



- Dra utløserhendelen **A** opp.
- Drei stolen til ønsket posisjon.
- Slipp utløserhendelen.

Stolen stopper rotasjonen når du slipper utløserhendelen og låser automatisk i den valgte posisjonen. Stolen har en svingradius på 270°. Automatisk endestopp sikrer trygg bruk.

⚠ Advarsel!

Plasser Nova slik at stolens bevegelsesmønster ved bruk ikke kan forårsake situasjoner som kan føre til skade på stolen, bygningsdeler, andre personer eller deg selv.


Fotbrettet og ryggen må ha fri bane. Sikkerhetssone rundt stolen er 110 cm fra senter av understellet.

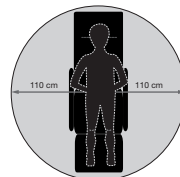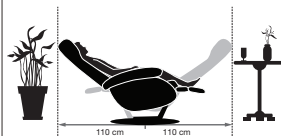

Vinkling av nakkestøtten

For å gi en bedre tilpasset vinkel til nakken, for eksempel når man leser, eller ser på TV, kan øvre del av ryggen vinkles.

- Vri på rattet til du finner den ønskede posisjonen på nakkestøtten. Trykk eventuelt lett på øvre del av ryggen for å hjelpe til.

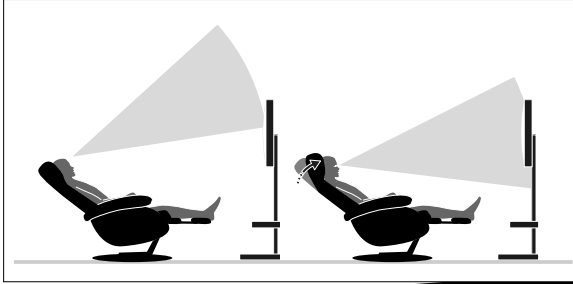


Justering av armlenehøyde

Armlenehøyden justeres ved å heve eller senke sidevengene. Innstillingen er trinnløs og sikrer god støtte for armene.

- Trekk ned glidelåsen på utsiden av armlenet.
- Løsne rattet **A** inne i armlenet.
- Skyv sidevangen opp eller ned. Skru til rattet når du har oppnådd ønsket høyde.
- Dra opp glidelåsen igjen.
- Gjør den samme justeringen på den andre siden og påse at du har lik høyde på begge armlener. Se måleskala.
- Standard høyde er merket med oransje.
- Armlenet i nederste posisjon muliggjør sideveis forflytning.

⚠ Advarsel!

Klemfare! Unngå å få fingrene i mekanikken på innsiden av armlenet ved justering.

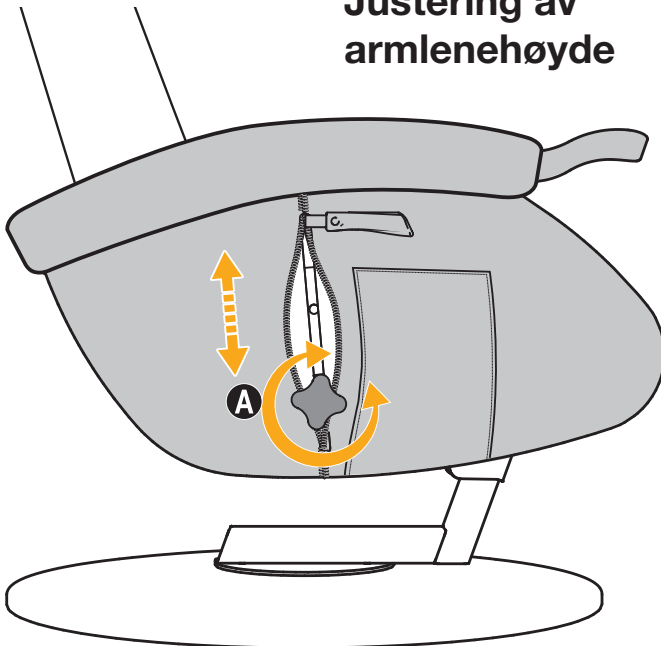

Håndkontrollen

Den oversiktlige og lettfattelige håndkontrollen gir deg mulighet til å betjene stolen i henhold til egne ønsker og behov.

Løft:



Oppreist stilling vist på stol med rettløft.

Fra en sittende stilling går fotbrettet ned og sitteenheten løftes.



Oppreist stilling vist på stol med skråløft.

Fra en sittende stilling går fotbrettet ned og sitteenheten løftes og vinkles forover.

Hvile:



Sitteenheten senkes og tiltes bakover. Fotbrettet går opp.

Rygg:




Ryggen vinkles forover uavhengig av andre funksjoner.

Rygg:



Ryggen vinkles bakover uavhengig av andre funksjoner.

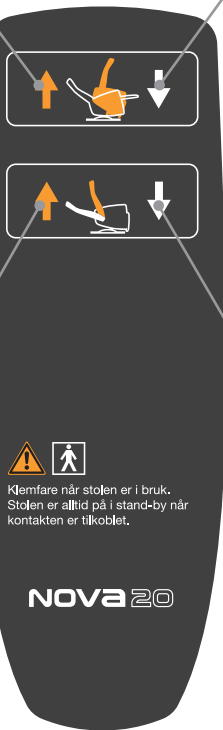

 
Klemfare når stolen er i bruk.
Stolen er alltid på i stand-by når kontakten er tilkoblet.

NOVA 20

Håndkontrollen er merket i henhold til kravene til elektromedisinske produkter med permanent strømtilkobling benyttet i hjemmet uten tilsyn.



Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
T: 66 96 38 00
F: 66 96 38 80
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no