



# VELA Blues 210

VARIANT:

AVANSERT

Manual. nr. 105753



**VIKTIG!** Den elektriske rullestolen må lade i 12 timer før den kan brukes.

### **NÅR DU TAR RULLESTOLEN I BRUK**

- :: Slå på rullestolen med I/O – knappen.
- :: Sett deg i rullestolen og reguler funksjonene, slik at du får en optimal sitte- og kjørekomfort.

### **FØR DU KJØRER RULLESTOLEN**

- :: Setetilt/vinkelen må stå i vannrett stilling (nøytral posisjon).
- :: Setet må alltid være senket til laveste posisjon av hensyn til din sikkerhet før forsering av hindringer, kjøring på skrått underlag, eller i høy hastighet.
- :: Hastigheten reduseres automatisk ved heving/tilt av setet (Gul hastighetsindikatorer blinker på joysticken).

### **INN- OG UTSTIGNING**

- :: Slå alltid av rullestolen før inn- og utstigning.
- :: Seteløft og -tilt kan være til god hjelp ved inn- og utstigning.

### **SIKKER KJØRING**


- :: Rullestolen må ikke kjøres skrått på et hellende underlag, da helling til siden øker risikoen for farlige situasjoner.

### **KJØRING VIA JOYSTICK**

- :: Slå rullestolen på ved å trykke på I/O knappen.
- :: Reguler seteløft til laveste posisjon (nøytral posisjon).
- :: Reguler tilt til vannrett stilling (nøytral posisjon).
- :: Reguler ryggvinkling.
- :: Reguler hastigheten med opp/ned knappen. Hastighetsindikatoren lyser gult (1-5 punkter, avhengig av hastighet).
- :: Styr rullestolen med joystick i den retningen du ønsker å kjøre.

Stort utslag= kraftig akselerasjon og høy fart.

Lite utslag = svak akselerasjon og lav fart.

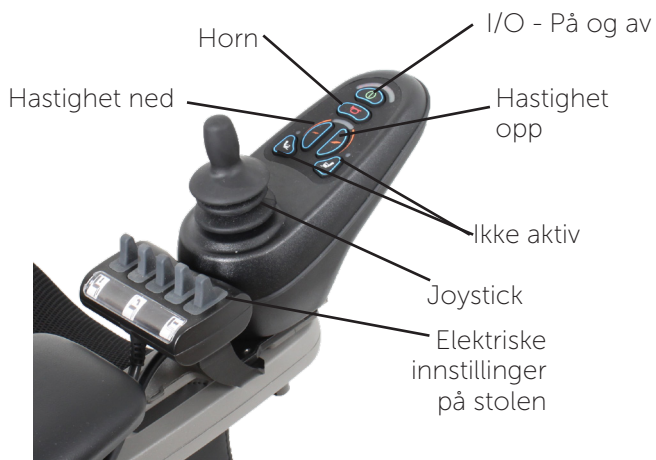

## LADING AV RULLESTOLEN

:: Batteriindikatoren er innebygd i joystick. Ved fullt ladet batteri lyser de fargede lysdiodene: grønn, gul og rød.

## SLIK LADER DU STOLEN (STANDARD OPLADER)

:: Batteri bør lades hver natt.

:: Laderen er helautomatisk, og regulerer ladestrøm etter behov.

1. Stolen parkeres og slås av (I/O knappen)
2. Ladestøpselet settes i kontakten foran på styreboksens underside.  
**Merknad!** Rullestolen kan ikke slås på under lading.
3. Bjælken i det lille display på toppen av laderen viser, at ladning er i gang.
4. Batteriet er fulladet, når lampen på laderen lyser grønt.

## Advarsel! Dekk ALDRI laderen når den er koblet til strøm.

Mere informasjon om bruk av stolen, feilsøking og vedlikehold finnes i Bruksanvisningen og på [www.vermundlarsen.no](http://www.vermundlarsen.no).  
Informasjon om tilbehør: Kontakt VELA.