




Hurtigstartveiledning

FlexiBlink Life sammenkobling


FlexiBlink
Life

Denne veiledningen forklarer i korte trekk hvordan du sammenkobler enheter i *FlexiBlink Life* - serien. Vennligst se i bruksanvisningen for detaljerte beskrivelser og teknisk feilsøking.



1 Sammenkobling for første gang

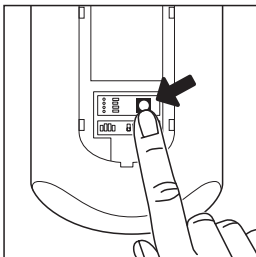



1.1 Trykk **to** ganger på *Life-knappen* på en av enhetene.

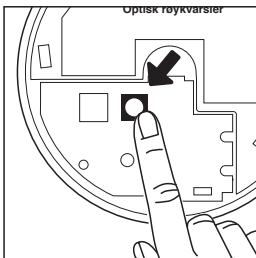

1.2 Trykk **én** gang på *Life-knappen* på den andre enheten.

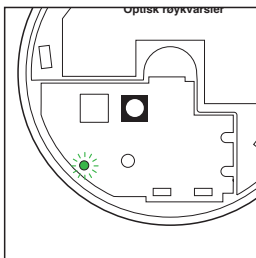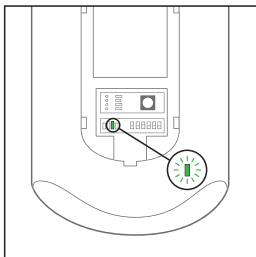


1.3 Indikatorlampene blinker grønt.

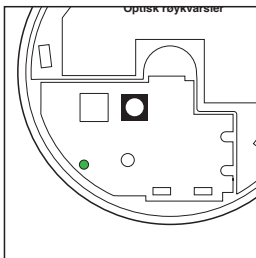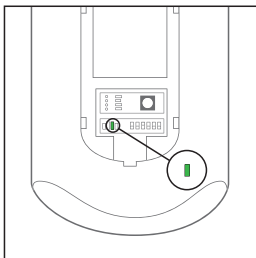


1.4 Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.



2 Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

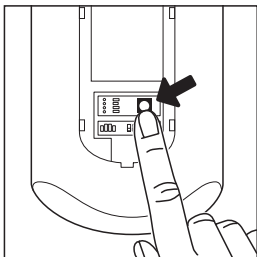



2.1 Trykk **to** ganger på *Life-knappen* på enhet fra eksisterende system.

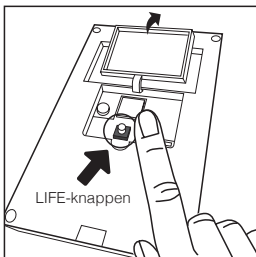

2.2 Trykk **én** gang på *Life-knappen* på den nye enheten.

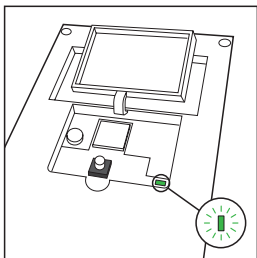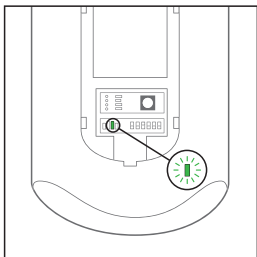

2.3 Indikatorlampene blinker grønt.

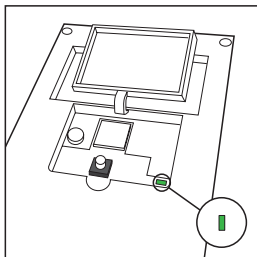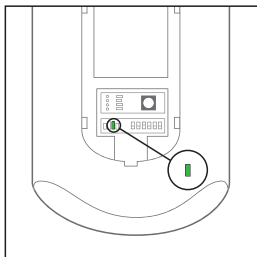

2.4 Sammenkoblingen bekreftees ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammkoblingen.

3 Nullstilling av sammenkobling

3.1 Trykk *Life-knappen* 5 ganger for å nullstille sammenkoblingen. Nullstillingen bekreftes med røde og grønne blink.

Følg denne QR-koden for å se fremgangsmåten for sammenkobling på vår YouTube-kanal:



Vestfold Audio AS

Tlf: 33 47 33 47

E-post: post@vestfoldaudio.no

www.vestfoldaudio.no