

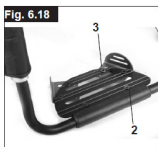


Bruk av rullestolen

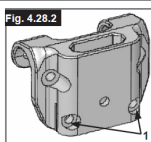


Justere benstøtten

Ved å skru opp skruen (1), kan du justere lengden på benstøtten slik at den passer lengden på leggene dine. Stram til etter justering. Vinkelen på benstøtten kan justeres individuelt ved å løsen på skruene (2). Sidekanten (3) på benstøtten forhindrer at føttene dine sklir av benstøtten. Kontroller at alle skruer er strammet som de skal etter enhver justering (se avsnittet om Tiltrekkingsmoment) (Fig. 6.17 - 6.18).

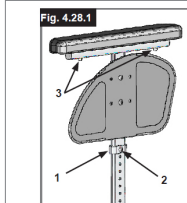

Høydejusterbart armlene

Montering: Skyv stolpen på armlenet ned i mottakeren på rullestolen, til den stopper.
Justere høyden: Trekk stolpen på armlenet ut av mottakeren. Juster plasseringen av høydejusteringbraketten (1) ved å fjerne skruen (2) og flytte den til ønsket stilling. Sett tilbake skruen og stram den. Skyv stolpen på armlenet tilbake i mottakeren, (Fig. 4.28.1 - 4.28.2)

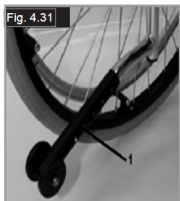

Tippesikring

Tippesikringene (1) gir ekstra sikkerhet for nybegynner mens de fortsatt lærer å bruke rullestolen. Tippesikringene (1) forhindrer at rullestolen tipper bakover.

Tippesikringene (1) kan flyttes nedover ved å skyve på dem. De kan i tillegg svinges forover. Det skal være en avstand på 3 - 5 cm mellom tippesikringene og bakken. Du må svinge tippesikringene forover når stolen skal kjøres opp eller ned fra høye hindringer (slik som en fortauskant) for å forhindre at de berører bakken.

Hurtigkobling drivhjul

Trykk inn knappen i midten av drivhjulet for å ta av eller sette på hjulet.

⚠ Sjekk at hjulet er skikkelig festet ved å påse at knappen spretter ut ca 5 mm når hjulbolten er helt inne i hylsen.

Krasjtestet

Rullestolen kan benyttes som passasjer sete i bil, og er testet og godkjent henhold til ISO 7176-19.

📖 Les mer om sikkerhet i bil i rullestolens brukermanual.



Sunrise Medical AS
Dynamitveien 14B
1400 SKI
T: 66 96 38 00
F: 66 96 38 80
E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no

MANUELL RULLESTOL




QUICKIE®

Life RT

HURTIGMANUAL

Når du mottar rullestolen

*Bilder og utstyr kan avvike noe fra standard utførelse

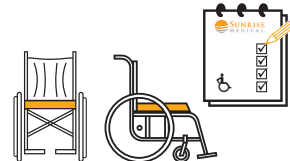

Rullestolen leveres i setebredder i intervallet 28-48 cm og setedybde 32-46 cm. Kontroller at rullestolen du har mottatt har korrekte mål i henhold til din bestilling. Angivelse av rullestolens mål finner du avmerket på drivakselen, under setet.



Legg seteputen (tilbehør) på plass, påse at den ligger rett vei og riktig på setetrekket. For din egen sikkerhet, og for å få best mulig utbytte av mulighetene i din nye rullestol, anbefaler vi at du leser brukermanualen nøye før du tar i bruk rullestolen.

Lett stabil rullestol med mange tilpasningsmuligheter

Stolen kan få meget lav setehøyde (28 cm) og smal ramme, gjør dette til en stol som egner seg godt til mange brukergrupper.


Stort tilbehørsprogram som inkluderer forskjellige drivhjul, Hemi kit, svinghjul, klesbeskyttere, armlen, kjørehåndtak, tippesikringer, ryggtrekk.

Quickie Life R kan man få med utsvingbare benstøtter eller fastfront

Fastfront stolen kan man forlenge i setedybde ved behov.

Stolen lages til hver enkelt bruker etter mål, spesifikasjoner og farge etter ønske.

Stolen kan brukes med ulike sykkel- og elektriske fronter

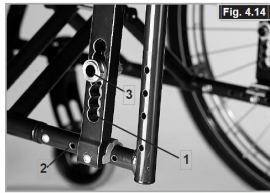

Drivhjulbraketter


Plasseringen av kroppens tyngdepunkt i forhold til bakhjulene er vesentlig for at rullestolen skal være lett og komfortabel å bruke. Flere stillinger kan brukes: Ved å flytte drivhjulbraketteren (1) bakover langs hullene i rammen (2), vil stolen gjøres mer stabil men tyngre å bruke. Det samme gjelder dersom drivhjulbraketteren plasseres lenger forover. Setehøyden kan justeres ved å flytte akselhylsen (3) på akselplaten. Pass på at alle skruene er forsvarlig strammet når justeringen er fullført (se avsnittet om Tiltrekkingsmoment).

Det kan være nødvendig å justere både bremsene og svinghjulene på nytt.



Justering

For å justere bremsen, løsne skruene (1) og monter bremsen på et sted hvor den vil virke på riktig måte. Pass på at avstanden mellom hjulene og bremsene er i samsvar med de fastsatte spesifikasjonene. For å stille inn den korrekte avstanden, løsne på skruen. Stram deretter skruen på nytt.


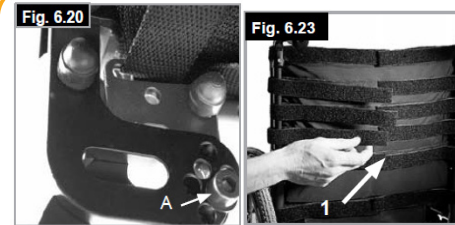


Vinkeljusterbar fast rygg (Fig. 6.20)

Ved justering av fast rygg må du løsne bolter "A" på begge sider. Sving festene til ønsket stilling og monter boltene. Dra til.

Justerbar velcroygg (Fig. 6.23)


Borrelåsen på den justerbare velcroyggen kan justeres ved å løsne borrelåsene og flytte dem og stramme eller løsne båndene og feste på nytt (1). Gjenta prosessen for hver rem.

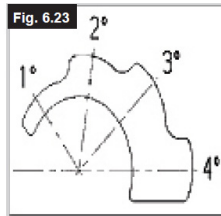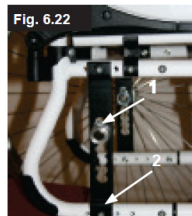

Camber (Fig. 6.22 - 6.23)

Stolens cambring kan justeres fra 1° til 4°.

Dette vil øke stolens stabilitet slik at den ikke velter til siden, samtidig som styringen også vil forbedres. Løsne skruene på den perforerte platen (1). Juster deretter adapteren (2) til ønsket vinkel. Stram så skruene til på nytt (se avsnittet om dreiningsmoment). Stolens bredde vil økes ved å stille inn cambringsvinkelen (hver grad øker stolens bredde med ca. 1 cm).

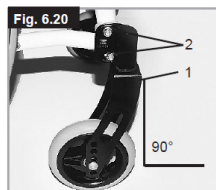

Svinghjul, svinghjulsfester og gafler (Fig. 6.20)

Svinghjulsfestene må tilpasses og bremsene kontrolleres hver gang drivhjulene har blitt justert. Kontroller stillingen på svinghjulsadapteren (1) ved å sette en rettvinklet trekant ved siden av den, og se på den forfra. Kontroller at adapteren er i rett vinkel i forhold til gulvet. Ved å skru opp skruene (2) og flytte adapteren, kan du rejustere hjulene til sin optimale stilling ved å justere de korresponderende tannsegmentene. Kontroller at alle skruer er strammet som de skal etter enhver justering.



Justere hjulstillingen

- Viktig: Rullestolen vil kun rulle slik den skal dersom stillingen for drivhjulene er optimert, som betyr at hjulstillingen må justeres på riktig måte. For å gjøre dette, mål avstanden mellom både svinghjulene og drivhjulene for å forsikre deg om at de er parallelle med hverandre. Forskjellen mellom begge målene skal ikke overstige 5 mm. For å justere hjulene slik at de er parallelle med hverandre, løsne på skruene og vri akselhylsen deretter. Kontroller at alle skruer er strammet som de skal etter enhver justering (se avsnittet om Tiltrekkingsmoment).

Høyderegulerbare kjørehåndtak

Disse håndtakene er festet med to bolter, slik at de ikke plutselig sklir ut. Kjørehåndtakene kan justeres ved bruk av utløerspaken (1) for å dekke forskjellige behov. Du vil høre låsemekanismen når du flytter spaken. Du kan nå lett plassere kjørehåndtaket i den stillingen du ønsker. Mutteren (2) på strammespaken bestemmer hvor stramt kjørehåndtakene er festet på plass. Dersom mutteren er løs når strammespaken har blitt justert, vil også kjørehåndtaket være for løst. Vipp kjørehåndtaket fra side til side før bruk, for å forvisse deg om at det er festet godt på plass.

