



#### Justere benstøtten

Ved å skru opp skruen (1), kan du justere lengden på benstøtten slik at den passer lengden på leggene dine. Stramt til etter justering. Vinkelen på benstøtten kan justeres individuelt ved å løsen på skruene (2). Sidekanten (3) på benstøtten forhindrer at føttene dine sklir av benstøtten. Kontroller at alle skruer er strammet som de skal etter enhver justering (se avsnittet om Tiltrekkingsmoment) (Fig. 4.11 - 4.12).

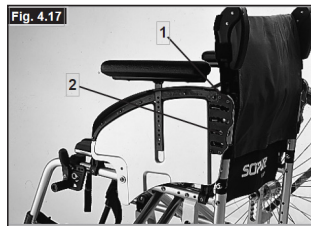

#### Høydejusterbart armlene (tilbehør)

Montering: Skyv stolpen på armlenet ned i mottakeren på rullestolen, til den stopper. Justere høyden: Trekk stolpen på armlenet ut av mottakeren. Juster plasseringen av høydejusteringbraketten (1) ved å fjerne skruen (2) og flytte den til ønsket stilling. Sett tilbake skruen og stram den. Skyv stolpen på armlenet tilbake i mottakeren, (Fig. 4.28.1)

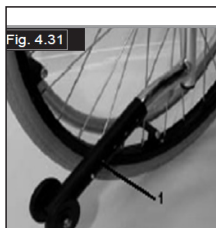

#### Tippesikring

Tippesikringene (1) gir ekstra sikkerhet for nybegynner mens de fortsatt lærer å bruke rullestolen. Tippesikringene (1) forhindrer at rullestolen tipper bakover.

Tippesikringene (1) kan flyttes nedover ved å skyve på dem. De kan i tillegg svinges forover. Det skal være en avstand på 3 - 5 cm mellom tippesikringene og bakken. Du må svinge tippesikringene forover når stolen skal kjøres opp eller ned fra høye hindringer (slik som en fortauskant) for å forhindre at de berører bakken.



#### Hurtigkobling drivhjul

Trykk inn knappen i midten av drivhjulet for å ta av eller sette på hjulet.

Sjekk at hjulet er skikkelig festet ved å påse at knappen spretter ut ca 5 mm når hjulbolten er helt inne i hylsen.

#### Krasjtestet

Rullestolen kan benyttes som passasjer sete i bil, og er testet og godkjent henhold til ISO 7176-19.

📖 Les mer om sikkerhet i bil i rullestolens brukermanual.



Sunrise Medical AS  
Dynamitveien 14B  
1400 SKI  
T: 66 96 38 00  
F: 66 96 38 80  
E: post@sunrisemedical.no  
[www.sunrisemedical.no](http://www.sunrisemedical.no)




## Youngster 3

## HURTIGMANUAL

Når du mottar rullestolen

\*Bilder og utstyr kan avvike noe fra standard utførelse

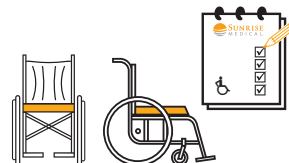

Rullestolen leveres i setebredder i intervallet 22-40 cm og setedybde 24-40 cm. Kontroller at rullestolen du har mottatt har korrekte mål i henhold til din bestilling. Angivelse av rullestolens mål finner du avmerket på krysset, under setet.



Rullestolen leveres komplett. Fold ryggen opp dersom den er lagt ned.


Legg seteputen (tilbehør) på plass, påse at den ligger rett vei og riktig på setetrekket. For din egen sikkerhet, og for å få best mulig utbytte av mulighetene i din nye rullestol, anbefaler vi at du leser brukermanualen nøye før du tar i bruk rullestolen.

Lettvekt barnestol med mange tilpassingsmuligheter. Kan enkelt bygges ut 2 cm i setebredde, samt 4 cm i setedybde uten bytte av deler. Stolen kan setedybde-forlenges enda mer ved bytte av deler. Dette gjør det til en stol å vokse i.

Stabil abduksjonsramme med oppfellbar fotplate som gjør forflytning enklere.

Stort tilbehørsprogram som inkluderer forskjellige drivhjul, svinghjul, klesbeskyttere, armlen, delte fotplater, kjørehåndtak, tippesikringer, ryggtrekk.

Stol egnet for barn med forskjellige behov. Mange fargealternativer gjør det til en stol som også andre barn tiltrekkes av. Noe som er viktig for barn med spesielle behov.

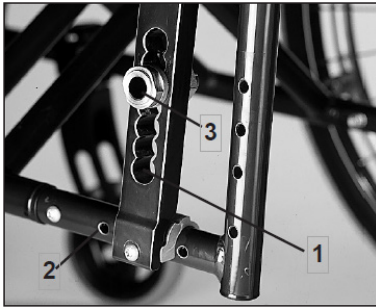


#### Drivhjulbraketter

Plasseringen av kroppens tyngdepunkt i forhold til bakhjulene er vesentlig for at rullestolen skal være lett og komfortabel å bruke. Flere stillinger kan brukes: Ved å flytte drivhjulbraketten (1) bakover langs hullene i rammen (2), vil stolen gjøre mer stabil men tyngre å bruke. Det samme gjelder dersom drivhjulbraketten plasseres lenger forover. Setehøyden kan justeres ved å flytte akselhylsen (3) på akselplaten. Pass på at alle skruene er forsvarlig strammet når justeringen er fullført (se avsnittet om Tiltrekkingsmoment).

Det kan være nødvendig å justere både bremsene og svinghjulene på nytt.

Cambringen kan stilles mellom 1° og 4°. På denne måten kan stolens sidestabilitet økes, samt gjøre stolen enklere å kjøre. Fjern skruene på akselplaten (1). Juster adapteren (2) til ønsket vinkel. Stram skruene på nytt. (se avsnittet om Dreiningmoment). Hvis cambringen heves, vil stolens samlede bredde også økes (med ca. - 1 cm pr. grad).

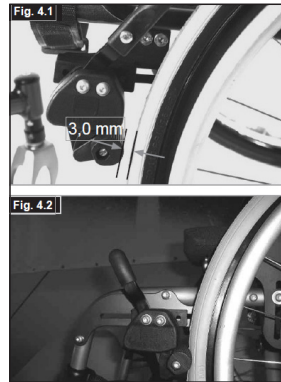

#### Justering av brems

For å justere bremsen, løsne skruene (1) og monter bremsen på et sted hvor den vil virke på riktig måte. Pass på at avstanden mellom hjulene og bremsene er i samsvar med de fastsatte spesifikasjonene. Still inn riktig avstand og stram deretter skruen på nytt.



#### Rygg høyde


Høydejusterbar rygg

Høyden på ryggen kan justeres i trinn på 2,5 cm. De justerbare trinnene er 25-40. Skru opp skruene (1+2) og juster ryggstøtten til den høyden du ønsker. Stram deretter til skruene (se avsnittet om Tiltrekkingsmoment).



#### Ryggvinkel

Ryggstøtten kan justeres i fem forskjellige stillinger (3° forover, 0°, 5°, 10°, og 15° bakover). Et deksel (2) er plassert på klesbeskytter, slik at vinkelen kan justeres ved å fjerne skruene (1) (se avsnittet om Tiltrekkingsmoment).

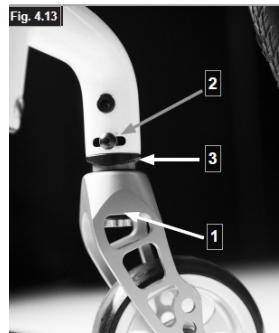

#### Vinkel på svinghjul

Du kan kontrollere at begge gafflene er stilt parallelt ved å telle tennene som er synlige på begge sider. Når du har justert svinghjulsgafflene vil tennene gi en sikker stilling, og kan justeres opp til 16° i trinn på 2°. Bruk den flate siden foran på svinghjulsgaffelen for å kontrollere at vinkelen er plan med underlaget. Dette patenterte designet gjør at svinghjulsgaffelen kan snus, slik at den står i rett vinkel i forhold til underlaget når setevinkelen endres. Innstilling av bremsene Etter justering av setehøyde bak eller tyngdepunkt, er det viktig å kontrollere og/eller etterjustere bremsene..



#### Høyderegulerbare kjørehåndtak

Disse håndtakene er festet med to bolter, slik at de ikke plutselig sklir ut. Kjørehåndtakene kan justeres ved bruk av utløerspaken (1) for å dekke forskjellige behov. Du vil høre låsemekanismen når du flytter spaken. Du kan nå lett plassere kjørehåndtaket i den stillingen du ønsker. Mutteren (2) på strammespaken bestemmer hvor stramt kjørehåndtakene er festet på plass. Dersom mutteren er løs når strammespaken har blitt justert, vil også kjørehåndtaket være for løst. Vipp kjørehåndtaket fra side til side før bruk, for å forvisse deg om at det er festet godt på plass.

