

# SLIK FUNGERER TIDEWAVE VENDEMADRASS



Vendefunksjon: velg vending til én side, eller begge (standard)



Grad av vending: 15, 20 (standard) eller 30 grader



Pause på sidene ved vending: Kontinuerlig vending, 15 min pause (standard) eller 30 min pause.




Vendehastighet: sakte, medium (standard) eller hurtig



Start/pause. Trykk for å starte program. Trykk igjen for å pause. Madrassen blir flat og starter opp igjen etter 30 min. Ved kortere pause, trykk start og vent til madrassen slipper ut luft og starter opp igjen automatisk. Trykk stopp etter endt bruk. **Statisk grønt lys betyr vendeprogram kjører. Blinkende grønt lys betyr vendeprogram på pause.**



Rødt lys betyr teknisk feil. Sjekk hurtigkobling (HLR). Ta inn/ut kontakt, vent 15. min og forsøk omstart.

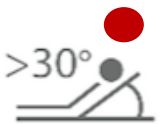

Rødt lys betyr at hjertebrettet må senkes til 30 grader eller mindre. Madrassen vil stoppe ved rødt lys. Hjertebrettet kan heves som et middel for å stoppe madrassen. Senk igjen for å starte opp igjen automatisk.



Akutt situasjon? Trykk inn rød HLR knapp, slik at all luft slippes av madrassen. **Vent 10 min før du starter opp igjen.**



Har du spørsmål? Mistenker du teknisk feil? Ta inn/ut støpsel og/eller slå av/på madrassen. Hvis det ikke fungerer, ring Bardum AS på tlf: 64 91 80 60 eller din kontaktperson i Bardum AS.

# *Bardum*

bardum.no • post@bardum.no • tlf. 64 91 8 0 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus