

## Intensitet

Intensiteten skal justeres i forhold til pasientens vekt (trinn 1-4)

40 - 70 kg	● ○ ○ ○ ○
70 - 100 kg	○ ● ○ ○ ○
100 - 130 kg	○ ○ ● ○ ○
130 - 150 kg	○ ○ ○ ● ○
ikke anbefalt	○ ○ ○ ○ ○
minimum	○ ○ ○ ○ ○


## Intervall

Du kan velge mellom 4 forskjellige intervall innstillinger.

1 2 4 6

○ ● ○ ○ ○

reposisjoneringer / time

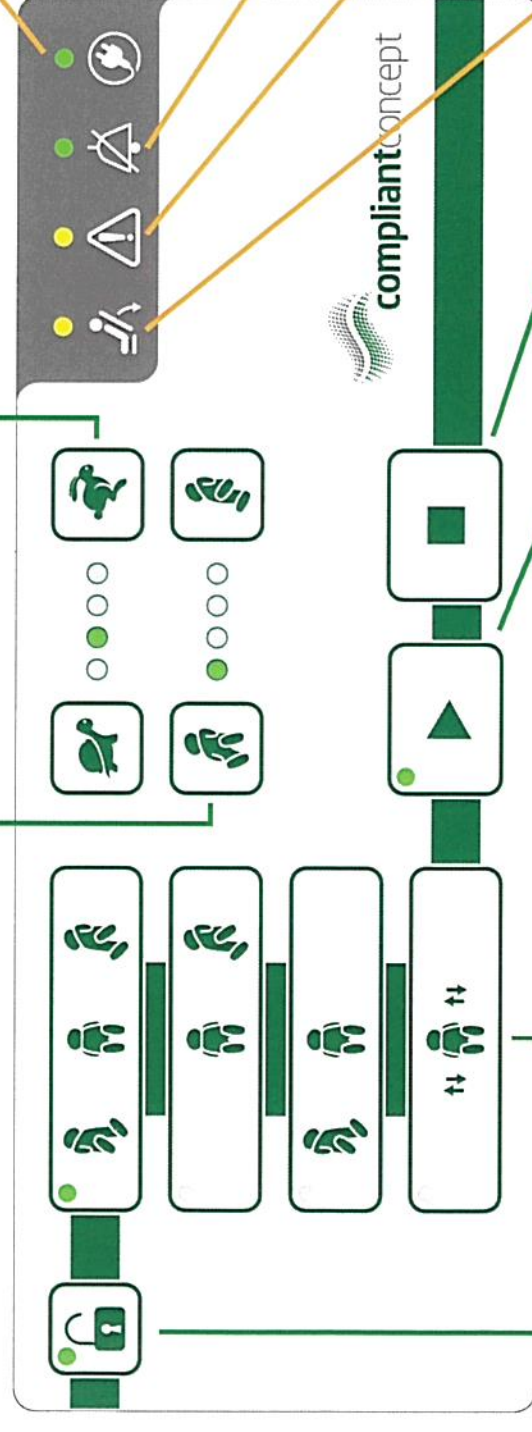

## Låseknapp

kort trykk:

Låser opp

Trykk og hold:  
skru akustisk varsel på/av

## Programmer

velg ønsket program

- reposisjonering til venstre og høyre side
- reposisjonering til høyre side
- reposisjonering til venstre side
- stimulerings program
- LED for valgt program lyser

## Start

## Stopp

## Spenningsindikator

LED lyser når AMS er tilkoblet nettstrøm

Behold AMS tilkoblet til nettstrøm også når den har stoppet

## Akustisk varsel

LED lyser når akustisk varsel er av.

Akustisk signal varsler når:

- AMS i drift frakobles nettstrøm
- teknisk feil oppstår
- ryggvinkel er for bratt
- madrass tilkobles

## Feilindikator

I tilfelle feil, følg disse trinn:

1. Sjekk om alle tilkoblinger er korrekt plugget inn
2. Reset enheten (Koble fra nettstrøm, vent til alle LEDs er av, koble til nettstrøm igjen)
3. Restart program.

## Ryggvinkel for høy

LED blinker: AMS stoppet, grunnet ryggvinkel >30°. Når ryggvinkel er <30°, restartes AMS automatisk.



AMS av  
LED slukket



AMS i drift  
LED lyser

