

Bruksanvisning Procell 834



PUMPEN Q2K-03

1. Power: ON/OFF
2. Comfort Setting
3. Cycle time min.
4. Alarm
5. Static/dynamic
6. Autofirm (Hold i 3 sekunder)
7. Lock (Hold i 3 sek)

- **ON/OFF (1)**
Bryteren er på høyre side av pumpen. Skru på den grønne ON/OFF knappen for å starte eller stoppe pum

- **Lock (7)**

Pumpen låses automatisk etter 5 minutter (den låses for at ingen skal komme borti panelet ved et uhell og endre på innstillingene). Hold knappen inne i 3 sekunder for å låse opp panelet.

- **Comfort setting (2)**

Du kan velge mellom 7 forskjellige nivåer fra panelet via Comfort setting (kategoriene Soft-medium-Firm). Madrasser tilpasser seg brukeren automatisk, men man har mulighet til å tilpasse madrassen etter behov. Det er ikke nødvendig for å oppnå optimal trykkfordeling.

- **Cycle time min (3)**

Du kan velge syklyus tid (cycle time). Den kan stilles til 10,15, 20 eller 25 minutter.

- **Alarm (4)**

Alarmen gir både lyd og lys når trykket er for lavt. For å dempe den lydbaserte alarmen trykker du på alarm knappen. Først vil alarm knappen blinke, trykk på den igjen for å deaktivere alarmen.

Ved strømbrudd holder nedre delen av cellene (cellene er todelt) på lufta uansett, og de øverste cellene holder 7-8 timer på lufta uten strøm.

Den eneste måten å få luften ut av de statiske cellene på er å trekke ut CPR. Så uansett ved strømbrudd eller hvis pumpen kobles ifra vil disse holde på luften og brukeren vil ikke ligge på sengebunnen.

Etter at strømmen er på igjen tar pumpen en systemsjekk og blåser opp alle celler og tar en standard programinnstilling.

- **Static/dynamic (5)**

Trykk for å instille madrassen til enten statisk dynamisk modus.

Statisk modus gir madrassen en fast overflate som gjør det lettere for pasienten å flytte på seg. Den statiske modusen forhindrer pasienten i å «bunne» i sittende posisjon (når hjertebrettet er hevet).

- **Autofirm (6)**

Trykk i 3 sekunder for å stille inn luftmadrassen til maks fasthet ved forflytning og stell. Pumpen går automatisk tilbake etter 30 minutter.

CPR FUNKSJON

Trekk CPR stroppen for å raskt slippe ut luften fra madrassen for å utføre CPR. CPR stroppen er plassert foran på høyre side av madrassen.

AVKOBLINGSHETTER

På Procell 834 kan man bruke en 1 hette til å deaktivere en luftcelle eller 2 hetter for å ta ut luftceller. Dette er for å oppnå full avlastning på f.eks hælene.