

Trinn 1 - Måle

Før du forflytter personen inn i Evolv må du måle (A) setedybde og lengde til (B) fotplater.



Advarsel: Følgende justeringer skal bare utføres uten bruker i hjelpemiddelet.

Trinn 2 - Setedybde

Bruk målingen ovenfor (A) til å justere setedybden på hjelpemiddelet. For å justere setedybden, løsner du knotten under setet (C). Trykk ned knappen «snap button» på justeringsrøret mens du beveger ryggen fremover for å minske setedybden eller beveger ryggen bakover for å øke setedybden. Stram knotten (C) etter justering.



Advarsel: Følgende justeringer skal bare gjøres i sittende stilling.

Trinn 3 - Ryggvinkel

Etter å ha oppnådd ønsket setedybde, roterer du justeringsknappen for ryggvinkelen (E) slik at (F) sete-/ryggvinkelindikatoren er i det grønne området før overgang til stående posisjon.

OBS: Gjenta trinn 2 og 3 for hver fargejustering.

Trinn 4 - Fotplater

Bruk (B) målingen til å justere fotplatens høyde. Løsne (G) sperrehåndtakene på fotplatene for å justere høyde og vinkel. Stram sperrehåndtakene etter posisjonering. Knærne skal være litt lavere enn hoften (H).

Trinn 5 - Posisjonering

Plasser brukerens hofter så nær som mulig (I) Evolvs stående hoftemidtpunkt. For å bestemme riktig posisjonering, skal bare to fingre passe mellom fronten av setet og baksiden av kneet (J).

Trinn 6 - Knebeskyttelse

Juster (K) knebeskyttelsen slik at den passer komfortabelt på knærne.

Inspiser ståstativet med jevne mellomrom for å sikre at det er sikkert å bruke.

