



UNLEASH  
POTENTIAL!

# INNOWALK

Inn- og ut guide

 made for  
movement

# INNHold

- SJEKKLISTE FØR BRUK s. 2
- FORFLYTNING AV BRUKER INN OG UT AV INNOWALK - SVINGSETE s. 2
- FORFLYTNING AV BRUKER INN OG UT AV INNOWALK - PERSONLØFTER s. 5
- BRUK AV BORD s. 6
- FORFLYTNING AV INNOWALK s. 7

## SJEKKLISTE FØR BRUK

### Sjekkliste - brukermanual kap 3.0

Daglig og før brukeren kommer inn i enheten, må det foretas en forhåndskontroll.

En forhåndskontroll inkluderer visuell og funksjonell inspeksjon for å avdekke løse deler / skruer og skadede belter og strenger.

#### Kontroller følgende deler:


- Festepunkt for ryggstøtten
- Bryststøtte
- Brystbelte
- Svinglås funksjon
- Hofte støtte
- Hoftebelte
- Fotplater og borrelåsstrapper
- Roterende punkter på leggstøtten og låsefunksjonen
- Føringsreim
- Fjernkontroll
- Brytere
- Strømforsyning

! Dersom det under forhåndskontrollen er deler som er ødelagte eller er synlig skadet, bør enheten ikke brukes før delene er byttet ut eller reparert.

## FORFLYTNING AV BRUKER INN OG UT AV INNOWALK VED HJELP AV SVINGSETE




### Forflytning inn i Innowalk - brukermanual kap 4.0

1

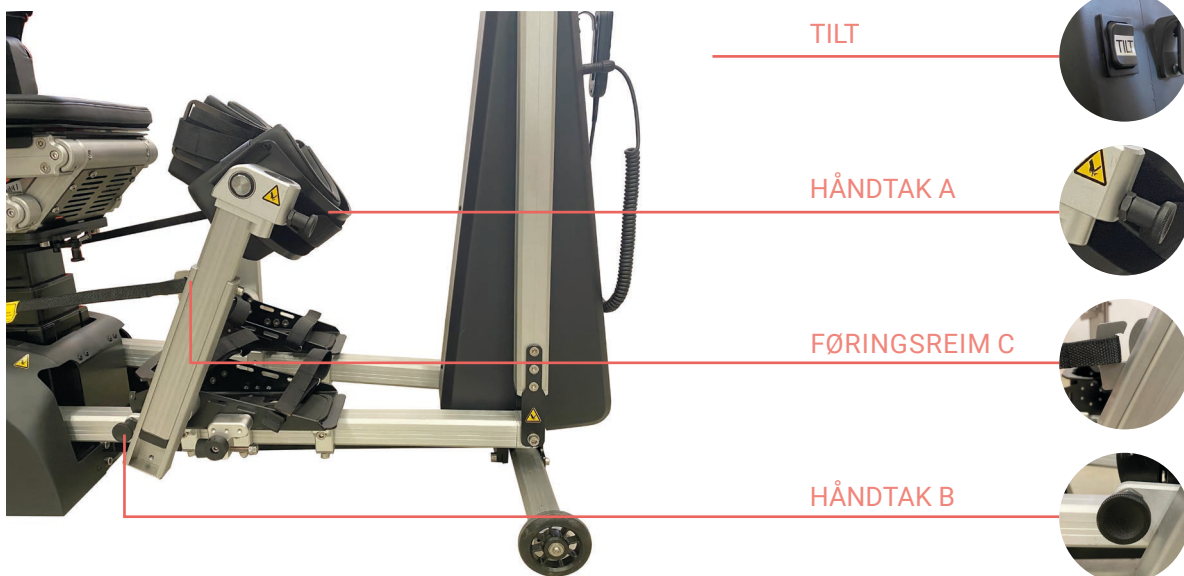

Påse at tiltfunksjonen er i nedre posisjon før setet svinges ut.

Trekk ut **håndtak A** (1), løft så opp **håndtak A** (2) og sving ut leggbøyle (3). Ta av **føringsreim C**. Trekk ut **håndtak B** og senk leggstøtten.

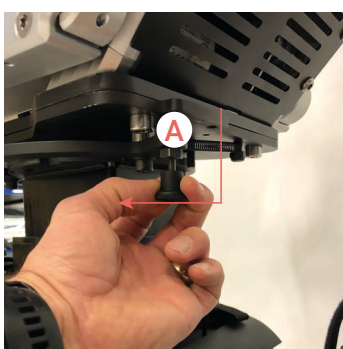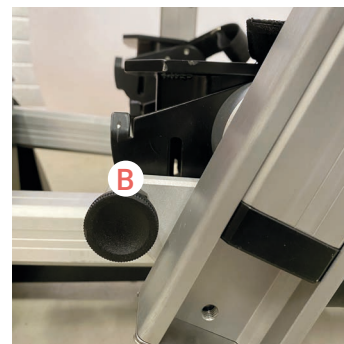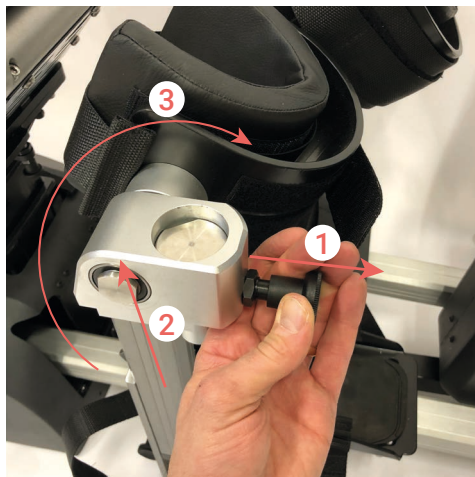

2

Sving setet fra utgangsposisjon 90 grader mot høyre ved å trekke **håndtak A** ned og mot deg selv, samtidig som setet roteres 90 grader.

OBS! Setet kan også tilvarende svinges mot venstre.


3

Setehøyde tilpasses hensiktsmessig høyde for forflytning (eks. fra rullestol). Setehøyde justeres med piltasten på fjernkontrollen.





4

Innowalk er nå klar med utsvingt sete samt nedfelt leggstøtte. Forflytt brukeren inn på setet. Plasser bruker **godt tilbake på setet, sikre bryststøtten** og **fest hoftebeltet**.

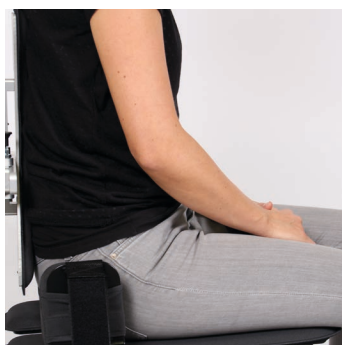


Når brukeren er godt sikret, justeres setehøyden ved hjelp av piltast på fjernkontroll til **angitt posisjon på løftesøylen**.  
Sving setet tilbake ved å trekke **håndtak A** ned og mot deg.  
Sving setet tilbake til utgangsposisjon. Plasser føttene på fotbrettet.

5

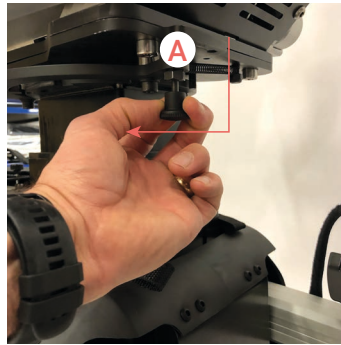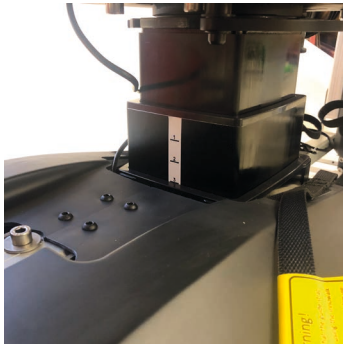

Løfte opp leggstøtten og sving tilbake leggøylen til låst posisjon (klikk) og fest **føringsreim** på høyre og venstre side.

6

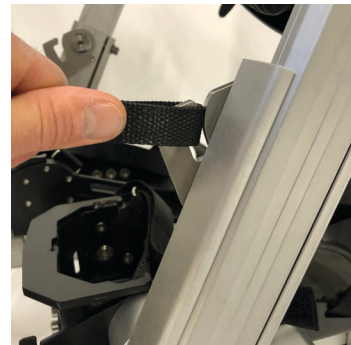

Påse at føringsreimen er i angitt posisjon.

Sørg for at hælen er helt tilbake på fotplaten og fest reimene.  
Hold igjen på **føringsreimen** når brukeren forflyttes fra sittende til stående.  
**Etterstram hoftebelte** i stående posisjon. Forsikre at brukeren står og beveger seg i en optimal posisjon.

7




## Forflytning ut av Innowalk

- Løsne hoftebelte
- Sørg for at tilt funksjonen er i nedre posisjon ved bruk av tilt bryter
- Senk brukeren ned til sittende posisjon
- Løsne stropper på fotbrett og leggbøyle
- Høyre leggbøyle svinges og legges horisontalt
- Sete svinges 90 grader til høyre
- Juster setehøyde til passende høyde for forflytning
- Løsne bryststrem



# FORFLYTNING AV BRUKER INN OG UT AV INNOWALK VED HJELP AV PERSONLØFTER

## Forflytning inn i Innowalk - brukermanual kap. 4.0

- 1 Start med Innowalk i utgangsposisjon. Åpne bryst- og hoftebelte.

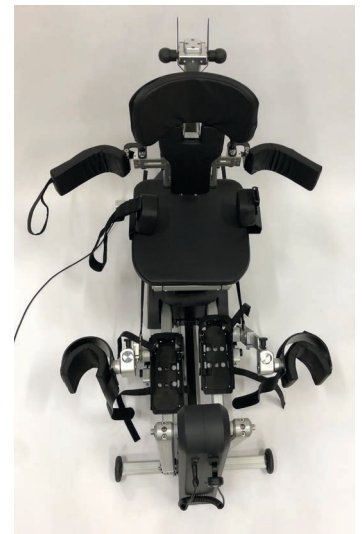

- 2 Sving ut leggbøylene på begge sider på følgende måte:  
Trekk ut **håndtak A** (1), løft så opp **håndtak A** (2) og sving ut leggbøyle (3).

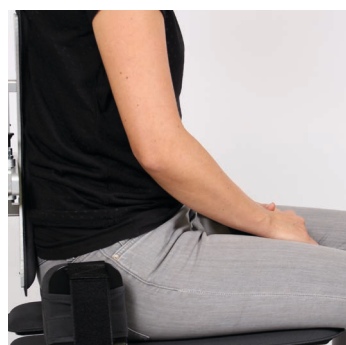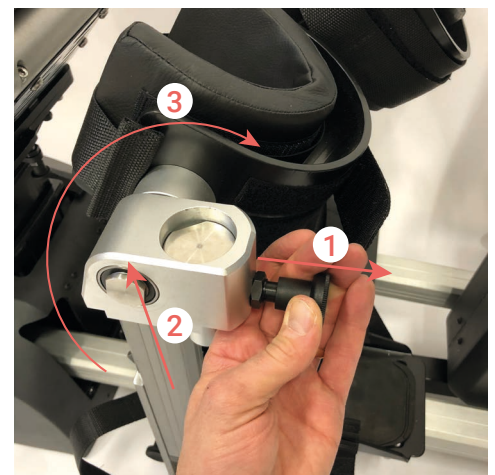

- 3 Forflytt brukeren inn på setet med personløfter.  
Plasser bruker godt inn på sete og fest bryststøtten.

4

Sving tilbake høyre og venstre leggbøyle i låst posisjon. Påse at føringsreimen er i angitt posisjon.

Hold igjen på **føringsreimen** når brukeren forflyttes fra sittende til stående. **Etterstram hoftebelte** i stående posisjon. Forsikre at brukeren står og beveger seg i en optimal posisjon.

## Forflytning ut av Innowalk


- Løsne hoftebelte
- Senk brukeren ned til sittende posisjon
- Løsne stropper på fotbrett og leggbøyle
- Leggbøylar svinges ut
- Løsne brysstøtte
- Forflytt bruker ut ved hjelp av personløfter

## BRUK AV BORD

### Bruk av bord - brukermanual kap. 7.8.1

Bord settes på og tas av når bruker er i stående posisjon.

Skyv bordet inn til det høres et "klikk". Bordet er nå festet. For å fjerne bordet trekk ut håndtaket og roter 90 grader.

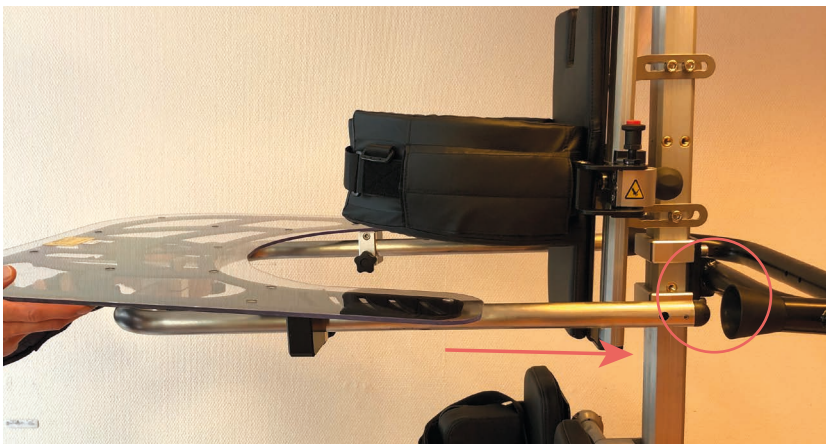

# AKTIVER TRANSPORTLØSNINGEN FOR FORFLYTTNING AV INNOWALK


## Aktiver transportløsningen - brukermanual kap. 7.16

Transporthjulene er integrert i produktet. Påse at Innowalk står på et flatt og jevnt underlag. OBS! Innowalk skal ikke transportes med bruker i.

For å aktivere transporthjulene sveives håndtaket bak på Innowalk mot klokken. Påse at kroken på **Del A** festes til **Del B**.

Løft opp **håndtak C** og sveiv helt tilbake, slik senkes transporthjulene ned.

Transporthjulene er nå aktivert og synlig.

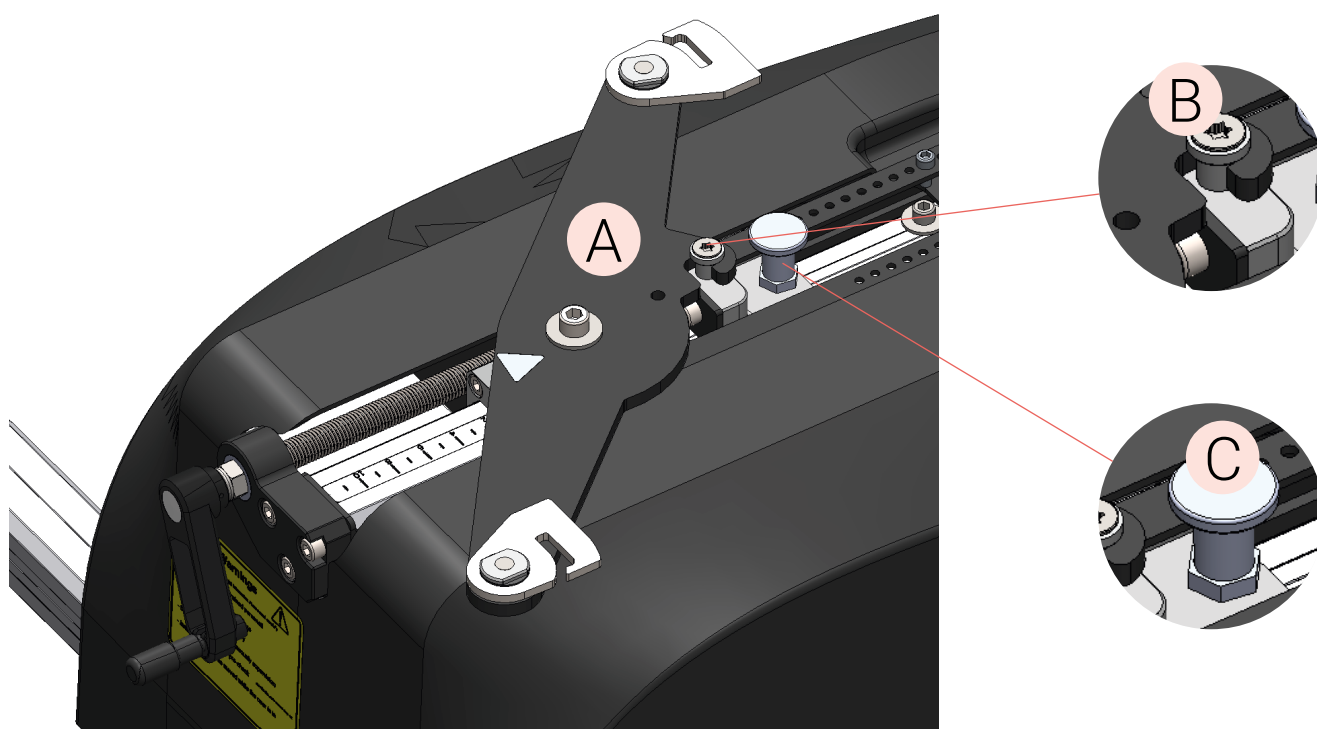

# DEAKTIVER TRANSPORTLØSNINGEN PÅ INNOWALK

## Deaktiver transportløsningen - brukermanual kap. 7.16

For å deaktivere transporthjulene sveives håndtaket bak på Innowalk mot klokken inntil Del C går tilbake i lås.

Frigjør **Del A** fra **Del B** ved å sveive med klokken. Sveiv **Del A** til angitt posisjon.

**For mer informasjon,  
kontakt oss på**

 +47 35 50 51 20

 [madeformovement.com](http://madeformovement.com)

