





NoDec® BARI Quickguide

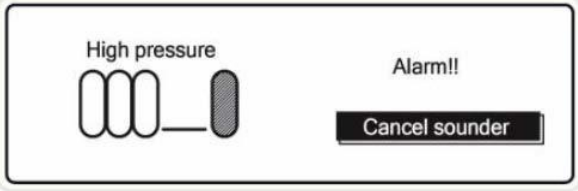
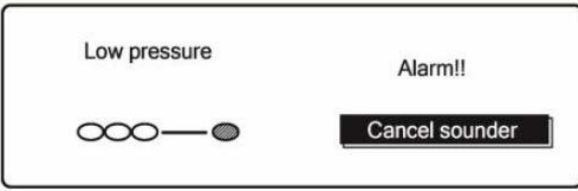

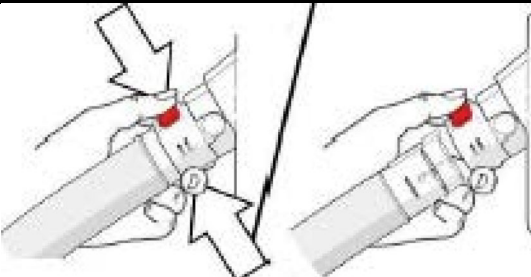
NoDec® BARI justerer sig automatisk ind efter patientens vægt og position – ingen indstilling skal foretages.

	<ul style="list-style-type: none"> • Displayet er låst • Tryk og hold ned på displayet indtil låsen er åben • Skærmen er låst op og klar til at navigere rundt i • Displayet låser automatisk efter 20 sekunder
---	---

<p>Skift (VENSTRE SIDE)</p>	<p>Tryk for ændringer mellem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vekseltryk  • Statisk  • Maks. oppustet (plejefunktion*)  <ul style="list-style-type: none"> – slår automatisk fra efter 20 minutter <p><i>* Bruges ved forflytning og plejeopgaver</i></p>
<p>Skift (HØJRE SIDE)</p>	<p>Tryk for ændringer i patientkomfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blød • Middel • Fast
<p>OK</p>	<p>Tryk for at bekræfte ændringer</p>
<p>Annuler</p>	<p>Vend tilbage til normal drift</p>
<p>Valg</p>	<p>Valgmuligheder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lysstyrke på display • Lydløs tilstand • Sprog

Alarmer/Fejlfinding

ALLE ALARMER VISES MED BLINKENDE RØDT LYS OG LYD

Højt tryk	
Årsag	Overtryk i madrassen
Løsning	Tryk forsigtigt på CPR-knappen og lad en lille smule luft sive ud. Sluk pumpen og tænd igen.
Lavt tryk	
Årsag	CPR-ventilen kan være udløst eller der er en lækage i madrassen.
Løsning	Sæt CPR-ventilen i eller check mulig lækage i madrassen eller utæthed i en celle. Sluk pumpen og tænd igen.
Strømsvigt	
Årsag	Fejl i strømforsyningen eller pumpen er blevet frakoblet strøm.
Løsning	Sæt ledningen i stikkontakten eller pumpen. Sluk pumpen og tænd igen.
NØDSITUATION HJERTESTOP	
Løsning	Grib om slangen der går ind i pumpen og tryk på den røde CPR-knap – slangen springer ud og madrassen tømmes hurtigt for luft.