


Quick Guide

OPUS 1-085EW | OPUS 1-090EW | OPUS 1-120EW | OPUS 1-K85EW

 Se Bruksanvisningen for utdypende info om de enkelte funksjonene.


HÅNDKONTROLL

DEN GRØNNE KNAPPEN

Håndkontrollens grønne knapp er ferdig programmert slik at lår- og ryggdel kjører samtidig:


Opp: Lårdel kjører helt opp, deretter ryggdel.
Ned: Ryggdel kjører helt ned, deretter lårdel.

Alle sengens funksjoner stopper automatisk når knappene slippes.

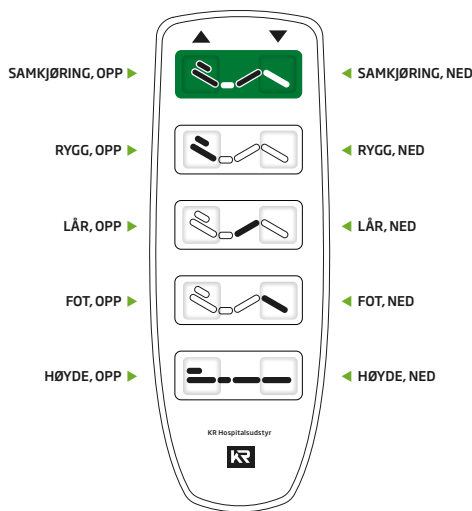

POSISJONER HJUL


VANNRETT = HJULENE ER FRI

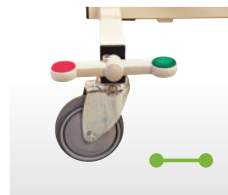

NØYTRAL

Hjulene er fri og bevegelige i alle retninger.


RØD PEDAL NED = BREMSE ER AKTIVERT

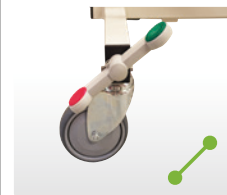

LÅST

Hjulene er låst og sengen kan ikke beveg.

GRØNN PEDAL NED I FOTENDE = RETNINGSSTYRING ER AKTIVERT

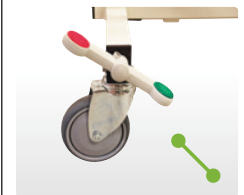

RETNINGSSTYRING

Bremserne er frigjort og hjulene i fotenden låser kjøretretningen.

Sengen er utstyrt med dreibare hjul, retningsstyring og sentralbremsesystem, som kan betjenes på begge sider av sengen. Aktiveres en pedal reagerer alle hjulene.

 **Sengens bremses skal alltid aktiveres når sengen ikke skal flyttes, dette for å unngå ulykker.**

LØFTEBØYLE

Løftebøylen monteres i en av holderne i hoveddelen. Løftebøylen må kun brukes innenfor sengerammen.

 **MAX. BELASTNING: 75 kg**

SENTEGRIND

Det finnes to typer sengegrinder, en brukerbetjent og en personalbetjent i to høyder. Begge monteres uten bruk av verktøy, vha. en styretapp og to snap-låser over sengens overramme.

 **Pass på ikke å klemme fingrene når sengegrinden nedfelles. Hold kun fast i sengegrindens overrør.**



Aktiver utløseren og legg sengegrinden ned. Motsatt løftes sengegrinden til den klikker seg på plass igjen.

	MADRASSMÅL				
			STD. SENTEGRIND Personalbetjent 158550H+158550V 158550KH+ 158550KV	STD. SENTEGRIND Brukerbetjent 158548H+ 158548V	HØY SENTEGRIND Personalbetjent 158547H+ 158547V 158547KH+ 158547KV Brukerbetjent 158549H+158549V
OPUS 1-	Lengde	Bredde	Høyde	Høyde	Høyde
K85EW	180 cm	83-85 cm	10-16 cm	—	17-23 cm (kun personalbetjent)
085EW	200 cm	83-85 cm	10-16 cm	12-18 cm	17-23 cm
090EW	200 cm	88-90 cm	10-16 cm	12-18 cm	17-23 cm
120EW	200 cm	118-120 cm	12-16 cm	12-18 cm	17-23 cm

DELING AV SENG

For å lette transport kan OPUS 1EW deles i 4-6 deler. Hvis du deler sengen i 6 deler veier ingen av delene over 25 kg ved OPUS 1-085EW, -090EW og -K85EW.

 **Se Bruksanvisningen.**




LIGGEFLATEFORLENGER

Sengen leveres med innebygd liggeflateforlenger. Liggeflaten kan forlenges fra 200 til 220 cm og ved OPUS 1-K85EW fra 180 til 200 cm.


1. Løsne fingerskruene under sengesidene i begge ender.
2. Trekk gavlene ut til stopp og stram fingerskruene.
3. Løsne fingerskruene under madrassbøylen i fotenden.
4. Trekk madrassbøylen ut til stopp og stram den.

 **Juster alltid madrassfestet i fotenden så det er mer enn 25 mm avstand ut til gavlen.**

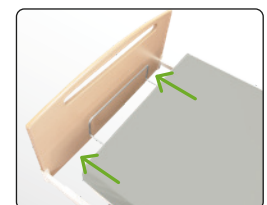

GENERELLE SIKKERHETSREGLER

Potensielle farer og anvisning for å unngå dem:

 Les **ALLTID** bruksanvisningen og følg dens anvisninger nøye.

 Personalet skal **ALLTID** risikovurdere om brukeren kan bruke sengen korrekt og sikkert.

KLEMFARE

- Pass på at ingen kommer i klem når sengen betjenes. Det er klemfare mellom sengens bevegelige deler.
- Se alltid på sengen mens du bruker håndkontrollen.
- Vær aktpågivende når sengen senkes fra hevet posisjon. Kryp aldri inn under sengen.
- Vær oppmerksom på klemfaren ved utilsiktet aktivisering av funksjonsknappene, pedaler, sengegrinder mm.

FALL FRA SENGEN

- Etterlat ikke brukeren i sengens høyeste posisjon.
- Senk alltid sengen før utstigning.
- Bruk sengegrindene.
- Lås alltid hjulene etter transport.
- Kryp ikke over gavler og sengegrinder for å komme ut av sengen.
- Kontroller at hjulene er låst før forflytning.

VELTERISIKO

- Transporter aldri sengen i høyeste posisjon, på skrånende eller ujevnt underlag.

FEILBETJENING

- Overlat kun håndkontrollen til personer som du vet kan bruke sengen og dens funksjoner.

EL-SIKKERHET

- Sengen må kun tilkobles strømforsyning 230VAC.
- Kontroller at sengen og annet elektrisk utstyr ikke påvirker hverandre, men fungerer etter intensjonen.
- Sørg for at ledninger o.l. ikke kommer i klem ved bruk av annet elektrisk utstyr i eller ved sengen.
- Heng håndkontrollen på sengen når den ikke brukes slik at den og dens ledning ikke ødelegges av slag eller støt, mistes i gulvet eller kommer i klem.
- Kjør ikke over ledninger med sengen.
- Hvis sengen ikke fungerer optimalt eller det er synlige skader på elektriske deler, kontakt teknisk personell.



Se Bruksanvisningen for mer info.



BRUK OG BEGRENSNINGER

Sengen er spesielt velegnet til pleiehjem og i hjemmepleie.

Sengen er kun beregnet til voksne brukere med en fysisk størrelse på:

HØYDE: Min./max. 146/195 cm (forlengt = 215 cm).
Merk v. KB5EW: Min./max. 146/175 cm (forlengt = 195 cm).


VEKT: 40 kg eller mer, dog max. 200 kg.


BMI: Body Mass Index på 17 eller mer.

 Maks. belastning må **IKKE** overskrides (Safe Working Load/SWL = 250 kg).

 Overhold sengens maks. tider i forhold til aktivisering og pauser. Driftsfrekvens (10%): Max. 2 min. ON / 18 min. OFF.

 Personer med fysiske eller psykiske begrensninger må ikke bruke sengens elektriske funksjoner uten oppsyn, med mindre personalet etter en risikovurdering tillater det og har gitt brukeren grundig opplæring.

 = 200 kg

 = 250 kg

MANUELL RENGJØRING VED BRUKER

Følgende tørkes med alminnelige rengjøringsmidler og en oppvridd fuktig klut:

- Synlig skitt.
- Flater som er i kontakt med brukeren, slik som håndkontroll, sengegrinder og gavler.
- Områder hvor støv og skitt naturlig samler seg.

Vasket område tørkes med en tørr og ren klut.

De rengjøringsmidlene som kan benyttes må ikke:

- Være sterkt alkaliske.
- Inneholde etsende preparater.
- Endre sengens overflatestruktur eller plastikkens klebeevne.
- Være fettnedbrytende.

Sengen kan desinfiseres med alkohol og produkter med lav konsentrasjon af klor.

 Ved rengjøring av sengen skal fabrikantens rengjøringsanvisning følges!

 Se Rengjøringsveiledningen for mer info.


MANUELL RENGJØRING FØR NY BRUKER



Se Rengjøringsveiledningen.

VASK I ANLEGG

Sengen kan vaskes i anlegg.

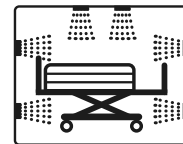

Se Rengjøringsveiledningen.

SERVICE

Serviceettersyn anbefales minst én gang årlig. Bruk ikke sengen hvis den er i stykker.



Se Serviceveiledningen for mer info.

