

Loggskjema ved montering av epilepsialarm

Arkiveres ved behov

• Navn på anlegg/bruker: _____

• Dato: _____

Versjon P154AA kan varsle med radiosignal til personsøker P137 (ikke aktuelt for P154BA).

• Fabrikkinnstilt adresse = 001. Hvis endret, ny adresse (0-9): _____

Ristefølerens følsomhet justeres med «Sensitivitet 1». Bevegelse i sengen indikeres med rødt lys under Inngang A på Sengemonitor.

• Lagret verdi Sensitivitet 1 (område «kl» 7-5): _____

Tidsforsinkelsen angir hvor lenge risting skal vare før den varsler.

Fabrikkinnstilt verdi = 3 (→ 15 sekunder).

• Lagret verdi Tidsforsinkelse (område 0-9): _____

Mikrofon kan kobles til, justeres da på sensitivitet 2.

• Hvis mikrofon P158 **ikke** er koblet til, still til minimum følsomhet, verdi = 7.

• Hvis mikrofon P158 er koblet til, fabrikkverdi = 1, lagret verdi (område 7-5): _____

Tips for P154x. For Pro P139 – se egen dokumentasjon.

